

Lancety OPTILETS 50 sztuk

Cena: 10,99 zł



Opis słownikowy

Dla kogo	Dla kobiet, Dla mężczyzn
Opakowanie	50 sztuk
Postać	-
Producent	DIAGNOSIS S.A.
Rodzaj produktu	Wyrób medyczny
Wiek	Dla dorosłych, Dla seniorów

Opis produktu

Opis

Stosowane jednorazowe lancety marki **Optilets**, przeznaczone do nakłuwacza Optilet mini, charakteryzują się wysoką sterylnością i cienkim, ostro zakończonym ostrzem. Dzięki tym cechom umożliwiają praktycznie bezbolesne nakłucie skóry oraz łatwe pobranie próbki krwi.

Zastosowanie

Do użytku z nakłuwaczem Optilet Mini.

Sposób użycia

- Umyj ręce ciepłą wodą z mydłem i dobrze je osusz.
- Umieść lancet w nośniku nakłuwacza.
- Usuń nasadkę zabezpieczającą.
- Wybierz miejsce nakłucia.
- Wykonaj nakłucie.
- Wykonaj pomiar poziomu glukozy zgodnie z instrukcją, oczyść miejsce nakłucia.
- Załóż nasadkę zabezpieczającą i wyrzuć lancet do odpowiedniego pojemnika.

Przeciwwskazania

- Nie należy ponownie używać lancetu.
- Nie należy pożyczać lancetu ani nakłuwacza innym osobom. Stwarza to niebezpieczeństwo przeniesienia infekcji.

Producent

Diagnosis S.A
ul.Gen.W. Andersa 38A
15-113 Białystok



APTEKA "POD GWIAZDĄ I" SP. Z O.O.
Ul. Azalii Pontyjskiej 2A, Nowa Sarzyna
+48 500 623 943