

Lansinoh Therapearl, kompres żelowy na piersi 2w1, 2 sztuki



Cena: 91,26 zł

Opis słownikowy

Dla kogo	Dla kobiet
Opakowanie	2 sztuki
Postać	kompres
Producent	SENSIMED
Przeznaczenie	Chłodzące, Łagodzące, Rozgrzewające
Rodzaj produktu	Wyrób medyczny, Akcesoria
Wiek	Dla dorosłych

Opis produktu

Opis

Lansinoh Therapearl to medyczny produkt w formie żelowego kompresu na piersi, który pomaga redukować siniaki, obrzęki oraz stany zapalne.

Działanie

- Kompresy zaprojektowane zostały z wykorzystaniem wiedzy medycznej na temat leczenia siniaków, obrzęków i stanów zapalnych poprzez terapię ciepłem lub zimnem.
- Stosowanie ciepłej terapii: łagodzenie obrzęków, odblokowanie przewodów mlekowych oraz terapia zapalenia sutka a także wspomaganie odciągania pokarmu. Terapia ciepłem pomaga złagodzić dolegliwości zapalenia sutka oraz wspomaga odciąganie pokarmu.
- Terapia zimnem: zmniejszenie bólu i obrzęków.
- Również do zastosowania z laktatorem: Pasuje do każdego rodzaju laktatora, aby poprawić przepływ pokarmu podczas odciągania pokarmu.

Skład

Opakowanie zawiera dwa kompresy żelowe.

Sposób użycia

Instrukcja dla kąpieli wodnej:

- Napełnić garnek taką ilością wody, aby kompres mógł się w niej zanurzyć nie dotykając dna naczynia. Doprowadzić wodę do wrzenia i zdjąć garnek z ognia. Nie zanurzać kompresów podczas doprowadzania wody do wrzenia. Używając tępego niemetalicznego narzędzia zanurzyć kompres w wodzie, a następnie go wyjąć. Jeśli po zanurzeniu na czas podany poniżej kompres nie osiągnął pożądanej temperatury, należy zanurzyć go ponownie (w tej samej wodzie) na dodatkową minutę. Nie pozostawiać podgrzewanego kompresu bez nadzoru. 1-2 minuty Nie dopuszczać do dłuższego kontaktu kompresu z naczyniem i źródłem ciepła, bo może to uszkodzić kompres lub spowodować jego pęknięcie. Przed użyciem osuszyć kompres. Przed

każdym jego użyciem należy sprawdzić, czy nie doszło do jego uszkodzenia lub wycieku - taki kompres należy wyrzucić do kosza. Przed każdym użyciem kompresu należy także sprawdzić jego temperaturę i w razie potrzeby schłodzić.

Jak stosować kompresy na zimno:

- Umieścić w zamrażalniku na przynajmniej 4 godziny. Przed przyłożeniem do piersi, kompresy należy włożyć do pokrowców.

Jak stosować okłady wraz z laktatorem:

- Kompresy podgrzać zgodnie z instrukcją dotyczącą podgrzewania ciepłych kompresów podaną przez producenta. Przed przystąpieniem do odciągania pokarmu, kompresy umieścić wokół zewnętrznej powierzchni lejka laktatora i zabezpieczyć zapięciem.

Jak stosować kompresy na ciepło (instrukcja dla kuchenki mikrofalowej):

- Umieścić kompres na talerzu kuchenki mikrofalowej. Ustawić czas w zależności od mocy kuchenki mikrofalowej. Każdy kompres należy podgrzać oddzielnie. Po skontrolowaniu stopnia ogrzania kompresu w razie potrzeby można podgrzać kompres przez dodatkowe 5 sekund.

Ostrzeżenia

- Nie podgrzewać opakowań dłużej niż zaleca producent. Podgrzewanie niezgodnie z instrukcją może spowodować uszkodzenie kompresów.
- Przed zastosowaniem zawsze należy sprawdzić ich temperaturę. Nadmierne podgrzanie lub zbyt długie przykładanie może prowadzić do uszkodzenia

ciała.

- Nie należy stosować na wrażliwą skórę lub rany otwarte. Stosować tylko pod nadzorem osoby dorosłej.
- Nie przekłwać i/lub nie połykać zawartości kompresów. Z kompresami nie należy zasypiać.
- Temperatura kompresu powinna być taka, aby kompres był ciepły w dotyku, ale nie gorący. Nieznaczne rozszerzanie się poprawnie ogrzanego kompresu jest normalnym zjawiskiem. Jeśli kompres podczas nadmiernie długiego ogrzewania pęcznieje jak balon lub pęka, należy natychmiast wyłączyć kuchenkę mikrofalową, poczekać na schłodzenie kompresu, a następnie ostrożnie wyrzucić go do kosza.
- Raz przegrzanego kompresu nie wolno używać ponownie.
- Nie używać na wrażliwej lub zranionej skórze ani w okolicach szwów. Nie używać w przypadku zaburzonego odczuwania temperatury przez skórę (np. w razie znieczulenia miejscowego lub przyjmowania środków przeciwbólowych). Nie używać w przypadku problemów z krążeniem krwi. W przypadku ostrego długotrwałego lub chronicznego bólu należy zasięgnąć

porady lekarza.

- Nie należy umieszczać pokrowców w kuchence mikrofalowej.
- W przypadku silnego, utrzymującego się przewlekłego bólu, należy skontaktować się z lekarzem.

Uwagi

- Bez dodatku BPA i BPS.
- W zestawie dwa pokrowce na kompresy zapinane na zatrzaski.
- Uniwersalne. Pasują do każdego rodzaju laktatora.

Producent

SensiMed
Jaworowa 84
05-830 Nadarzyn
sklep@lansinoh.pl