

Lapis Diabelski kamyk sztyft do usuwania b

Cena: 21,17 zł



Opis słownikowy

Dla kogo	Dla dziecka, Dla kobiet, Dla mężczyzn
Opakowanie	1 sztuka (laseczka)
Postać	sztyft
Producent	SALUS INTERNATIONAL SP. Z O.O.
Przeznaczenie	Brodawki, Kurzajki
Rodzaj produktu	Wyrób medyczny
Wiek	Dla dorosłych, Dla dziecka, Dla młodzieży, Od 4 lat

Opis produktu

Opis

Lapis Diabelski Kamyk to produkt w formie sztyftu przeznaczony do usuwania brodawek. Zawiera azotan srebra jako substancję czynną, która efektywnie wspomaga proces gojenia uszkodzeń skóry. Sztyft z azotanem srebra (Stilus Argenti Nitrici) jest stosowany jako pomocnicze narzędzie w leczeniu pewnych zmian skórnych o podłożu wirusowym, takich jak brodawki zwykłe i kłykie kończyste.

Składniki

Sztyft zawiera:

- azotan srebra 97 części, azotan potasu 3 części.

Zastosowanie

- Preparat stosowany pomocniczo w leczeniu niektórych zmian skórnych pochodzenia wirusowego: brodawek zwykłych (verrucae vulgares) oraz kłykcin kończystych (condylomata acuminata).
- Wspomaganie procesu gojenia, przyspieszenie ziarninowania i epitalializacji.

Sposób użycia

- Należy dokładnie przeczytać ulotkę informacyjną aby uniknąć nieprawidłowego użycia wyrobu medycznego.
- Przed użyciem należy założyć okulary ochronne. Zaleca się również stosowanie rękawic ochronnych.
- Zdjąć z produktu zatyczkę ochronną oraz usunąć ciekłą, kolorową warstwę parafiny, która chroni sztyft przed wilgocią z powietrza.
- Z czubka sztyftu bardzo delikatnie usunąć kolorową warstwę zielonej parafiny. Nie wdychać pyłu.
- Ostrożnie pocierać powierzchnię brodawki (kurzajki) sztyftem ruchami kołowymi przez kilka sekund. Naturalna wilgotność dotkniętego miejsca po kilku minutach rozpocznie reakcję z azotanem srebra.
- Nie dopuścić do kontaktu ze zdrową skórą.
- Po 24 godzinach od aplikacji można przyspieszyć gojenie poprzez delikatne usunięcie powstałej czarnej plamy. Zabieg należy



powtarzać, aż do całkowitego zniknięcia kurzajki.

Przeciwwskazania

- Nie stosować razem z innymi preparatami stosowanymi do leczenia kurzajek.
- Nie stosować na znamiona, ciemne plamy na skórze, piegi, brodawki wodne i brodawki łojotokowe.
- Przy obecności chorób, a także w razie jakichkolwiek wątpliwości odnośnie rodzaju brodawki należy skonsultować się z lekarzem.
- Nie stosować na błony śluzowe, miejsca silnie ukrwione oraz w przypadku zmian zlokalizowanych w okolicy oczu.

Producent

Lapis Product s.r.o.
Zdenka Stepanka 1785/3
CZ 708 00 Ostrava - Poruba