

Mepilex Border Ag, antybakteryjny opatrunek piankowy, 17,5 cm x 17,5 cm, 1 sztuka

Cena: 66,96 zł



Opis słownikowy

Dla kogo	Dla kobiet, Dla mężczyzn
Opakowanie	1 sztuka
Postać	Opatrunek
Producent	MOLNLYCKE HEALTH CARE POLSKA SP. Z O.O.
Przeznaczenie	Opatrunek
Rodzaj produktu	Wyrób medyczny
Wiek	Dla dorosłych, Dla seniorów

Opis produktu

Opis

Mepilex Border Ag to antybakteryjny opatrunek piankowy o wymiarach 17,5 cm x 17,5 cm, wzbogacony srebrem, które zapewnia działanie antybakteryjne. Dzięki swojej wszechstronnej konstrukcji, opatrunek jest odpowiedni do leczenia ostrych i przewlekłych ran o średnim i dużym wysięku, takich jak owrzodzenia, rany nowotworowe, odleżyny, oparzenia oraz rany pooperacyjne i urazowe.

Wskazania

Wyrób medyczny wskazany jest do leczenia ran ostrych i przewlekłych ze średnim oraz dużym wysiękiem, w tym owrzodzeń stóp i kończyn dolnych, oparzeń niepełnej grubości skóry, ran pooperacyjnych, urazowych oraz nowotworowych w przypadku, których zalecane jest utrzymanie wilgotnego środowiska, odprowadzanie wysięku, działanie przeciwbakteryjne oraz delikatne mocowanie. Produkt odpowiedni do stosowania na zakażone rany w ramach terapii pod nadzorem wykwalifikowanego personelu służby zdrowia.

Działanie

Mepilex Border Ag zawiera siarczek srebra, który uwalnia jony srebra tworzące skuteczną barierę przeciwbakteryjną i unieczynnia szeroki wachlarz patogenów występujących w ranach (bakterii i grzybów). Wyrób zatrzymuje znaczne ilości wysięku i pozwala zoptymalizować wilgotne środowisko rany. W opatrunku wykorzystano technologię Safetac czyli technologię miękkiego przylegającego silikonu, która zmniejsza ból u pacjentów i minimalizuje urazy rany. Silikon delikatnie przylega do suchych powierzchni, jak np. skóra, jednocześnie nie przylega do powierzchni wilgotnych, takich jak otwarte rany. Dodatkowo uszczelnia brzegi rany sprawiając, że wydzieliny z rany nie rozprzestrzeniają się na skórę otaczającą uszkodzoną tkankę dzięki czemu chroni ją przed maceracją.

Sposób użycia

Należy dokładnie oczyścić ranę przed aplikacją opatrunku. Zakładając opatrunek należy upewnić się, że został zachowany co najmniej dwucentymetrowy margines na skórze zdrowej otaczającej łóżysko rany.

Ostrzeżenia



APTEKA "POD GWIAZDĄ I" SP. Z O.O.
Ul. Azalii Pontyjskiej 2A, Nowa Sarzyna
+48 500 623 943

- Produkt jednorazowego użytku, nie stosować ponownie.
- Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Przechowywać w suchym miejscu w temperaturze pokojowej, chronić przed bezpośrednim nasłonecznieniem.
- Produkt sterylny. Nie stosować, jeżeli opakowanie wewnętrzne zostało otwarte lub uszkodzone przed użyciem. Nie wyjąławiać ponownie.
- Wyłącznie do użytku zewnętrznego.

Producent
MOLNLYCKE