

Mepilex Border Flex Lite, opatrunek, 7,5 cm x 7,5 cm, 1 sztuka (z opakowania 5 sztuk)



Cena: 7,88 zł

Opis słownikowy

Dla kogo	Dla kobiet, Dla mężczyzn
Opakowanie	1 sztuka
Postać	Opatrunek
Producent	MOLNLYCKE HEALTH CARE POLSKA SP. Z O.O.
Przeznaczenie	Absorbujące, Ochronne
Rodzaj produktu	Wyrób medyczny
Wiek	Dla dorosłych, Dla seniorów

Opis produktu

Opis

Mepilex Border Flex Lite to silikonowy, cienki opatrunek piankowy, przeznaczony do opatrywania ran bez wysięku lub z wysiękiem o średnim nasileniu. Produkt silnie przylega do skóry, nie odkleja się od niej i jest elastyczny, co pozwala na ruchy skóry. Można go również stosować do ochrony wrażliwej skóry.

Wskazania

Mepilex Border Flex Lite wskazany jest do opatrywania ran:

- bez wysięku;
- umiarkowanego wysięku (np. owrzodzeń nóg i stóp, odleżyn, ran chirurgicznych, ran pourazowych, ran pooperacyjnych, otarć czy pęcherzy).

Sposób użycia

Należy oczyścić ranę i osuszyć skórę dookoła niej, a następnie namieść opatrunek tak, aby jego centralna część w całości pokrywała ranę.

Właściwości

Mepilex Border Flex Lite charakteryzuje się czterowarstwową budową. Opatrunek zastosowany w nim wchłania wysięk z rany i zatrzymuje go w sobie. Przeciwdziała to wtórnym zakażeniom. Półtransparentna folia zewnętrzna umożliwia obserwację wysięku bez konieczności naruszania opatrunku. Dodatkowo opatrunek poprzez swoją paraprzepuszczalność umożliwia optymalizację wilgotnego środowiska rany.

Ostrzeżenia



- Przed zastosowaniem należy zapoznać się z instrukcją użycia wyrobu lub etykietą znajdującą się na jego opakowaniu.
- Nie stosować w przypadku uczulenia na którykolwiek ze składników wyrobu. W razie wystąpienia niepokojących objawów lub działań niepożądanych należy przerwać stosowanie wyrobu i skontaktować się z lekarzem.
- W przypadku wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem.
- Przechowywać w temperaturze pokojowej. Chronić od światła i wilgoci.
- Przechowywać w sposób niedostępny dla dzieci.
- Wyrób jednorazowego użycia. Nie stosować ponownie.
- Nie stosować, jeśli opakowanie było wcześniej otwierane lub uszkodzone.

Producent
MOLNLYCKE