

Mextra Superabsorbent, opatrunek, 10 cm x 10 cm, 1 sztuka (z opakowania 10 sztuk)



Cena: 13,04 zł

Opis słownikowy

Dla kogo	Dla kobiet, Dla mężczyzn
Opakowanie	1 sztuka
Postać	Opatrunek
Producent	MOLNLYCKE HEALTH CARE POLSKA SP. Z O.O.
Przeznaczenie	Ochronne
Rodzaj produktu	Wyrób medyczny
Wiek	Dla dorosłych, Dla młodzieży, Dla seniorów

Opis produktu

Opis

Mextra Superabsorbent to medyczny wyrób o wysokiej zdolności wchłaniania i zatrzymywania płynów, co pomaga zmniejszyć ryzyko maceracji. Jest odpowiedni do stosowania na rany przewlekłe z umiarkowanym i dużym wysiękiem. Wykonany z hydrofobowego i oddychającego materiału, posiada miękkie obramowanie, które zapewnia niski profil przy zatrzymywaniu wysięku. Produkt jest miękki i wygodny, co zwiększa komfort pacjenta.

Przeznaczenie

Ochrona i leczenie ran o umiarkowanym lub silnym wysięku.

Sposób użycia

- Oczyszczyć obszar rany. Dobrać odpowiedni rozmiar Mextra Superabsorbent.
- Nałożyć opatrunek białą stroną na obszar rany. Opatrunek powinien pokrywać ranę oraz obszar ok. 2 cm wokół rany.
- Zabezpieczyć Mextra Superabsorbent odpowiednim bandażem.

Ostrzeżenia

- Przed zastosowaniem należy zapoznać się z instrukcją użycia lub etykietą.
- Nie stosować w przypadku uczulenia na którykolwiek ze składników wyrobu. W razie wystąpienia niepokojących objawów lub działań niepożądanych należy przerwać stosowanie wyrobu i skontaktować się z lekarzem.
- Przechowywać w temperaturze pokojowej. Chronić od światła i wilgoci.
- Przechowywać w sposób niedostępny dla dzieci.
- Nie stosować, jeśli opakowanie było wcześniej otwierane lub uszkodzone.



Dodatkowe informacje

Mextra Superabsorbent:

- zmniejsza ryzyko wycieku i maceracji,
- zapewnia komfort pacjentowi,
- można pozostawić na ranie na maksymalnie 7 dni,
- stosowany przy umiarkowanym lub silnym wysięku,
- chroni obszar wokół rany,
- miękki i wygodny.

Producent

MOLNLYCKE