

Microdacyn 60 Wound Care, roztwór do leczenia ran, 100 ml



Cena: 40,53 zł

Opis słownikowy

Dla kogo	Dla kobiet, Dla mężczyzn
Opakowanie	100 ml
Postać	Roztwór
Producent	KIKGEL SP. Z O.O.
Przeznaczenie	Dezynfekujące, Przeciwbakteryjne, Przeciwwgrzybicze, Przeciwwirusowe
Rodzaj produktu	Wyrób medyczny
Wiek	Dla dorosłych, Dla młodzieży, Dla seniorów

Opis produktu

Opis

Microdacyn 60 Wound Care to wodny roztwór oksydantów (super-oxidized solution) o działaniu antybakteryjnym, przeznaczony do leczenia ran. Służy do odkażania i płukania ran ostrych oraz przewlekłych, wspomaga oczyszczanie autolityczne z martwicy i tworzy odpowiednie warunki do gojenia się ran.

Wskazania

Roztwór jest przeznaczony do płukania ran ostrych oraz przewlekłych takich jak: odleżyny, owrzodzenia, rany pooperacyjne i oparzeniowe, rany w przebiegu stopy cukrzycowej, owrzodzenia nowotworowe.

Dawkowanie

Microdacyn 60 Wound Care, roztwór do leczenia ran posiada szerokie spektrum skuteczności przeciwdrobnoustrojowej (wirusy, bakterie, zarodniki, grzyby) oraz nie powoduje uodpornienia bakterii. Wykazuje właściwości przeciwzapalne, niweluje nieprzyjemny zapach ran, jest hipoalergiczny oraz bezpieczny dla zdrowych komórek. Ma obojętny odczyn pH i nie wymaga wypłukiwania z ran głębokich. Został dopuszczony do stosowania w terapii podciśnieniowej NPWT.

Skład

40 ppm (0,004%) podchlorynu sodu, 40 ppm (0,004%) kwas podchlorawy, woda oczyszczona

Sposób użycia

Należy obficie nasączyć kompres gazowy roztworem i położyć bezpośrednio na ranę. Zabieg powtarzać 2 razy dziennie przez 15 min oraz w trakcie zmian opatrunku. Może być stosowany rutynowo zamiast soli fizjologicznej do przemywania ran pourazowych, ran oparzeniowych czy silnie zanieczyszczonych. Ułatwia usunięcie przyschniętego opatrunku po nasączeniu preparatem. Nie wymaga dodatkowego przemywania rany przed zastosowaniem preparatu. Nie jest konieczne wypłukiwanie preparatu z rany. Może być stosowany także bezpośrednio do płukania jamy ustnej, np. u pacjentów z zapaleniem błony śluzowej jamy ustnej w trakcie chemioterapii.

Ostrzeżenia

Stabilność i jałowość niezużytego roztworu są gwarantowane do 60 dni po otwarciu.

Producent

OCULUS TECHNOLOG.OF MEXICO

Galeria

