

Microdacyn 60 Wound Care, roztwór do leczenia ran, 250 ml



Cena: 56,27 zł

Opis słownikowy

Dla kogo	Dla kobiet, Dla mężczyzn
Opakowanie	250 ml
Postać	Roztwór
Producent	KIKGEL MIROSŁAW KIK
Przeznaczenie	Dezynfekujące, Przeciwbakteryjne, Przeciwwgrzybicze, Przeciwwirusowe
Rodzaj produktu	Wyrób medyczny
Wiek	Dla dorosłych, Dla seniorów

Opis produktu

Opis

Microdacyn 60 Wound Care to roztwór do leczenia ran o pojemności 250 ml, wykazujący szerokie działanie przeciwdrobnoustrojowe. Może być stosowany do przepłukiwania ucha zewnętrznego, spojówki oka, jamy ustnej oraz tkanek takich jak więzadła i ścięgna.

Składniki

Woda oczyszczona, podchloryn sodu (NaOCl) – 40 ppm, kwas podchlorawy (HOCl) – 40 ppm.

Zastosowanie

Owrodzenia, odleżyny, rany w przebiegu stopy cukrzycowej, rany oparzeniowe, rany pooperacyjne, owrodzenia nowotworowe.

Sposób użycia

Zaaplikować preparat bezpośrednio na ranę przy pomocy nawilżonej gazy; zabieg powtarzać 2 razy dziennie na okres 15 minut oraz podczas każdej zmiany opatrunku. Nasączenie przyschniętego opatrunku preparatem Microdacyn ułatwia jego usunięcie. Nie jest konieczne dodatkowe przemywanie rany przed zastosowaniem preparatu. Microdacyn może być rutynowo stosowany zamiast soli fizjologicznej do przebywania ran pourazowych, ran oparzeniowych czy silnie zanieczyszczonych.

Dodatkowe informacje

- Preparat Microdacyn jest przeznaczony wyłącznie do użytku zewnętrznego i nie powinien być stosowany do wstrzykiwań ani spożywania.
- Jeśli występuje nadwrażliwość na składniki preparatu, należy go unikać i nie stosować.
- Preparat Microdacyn nie jest cytotoksyczny (nie toksyczny dla komórek) ani uczulający.
- Może być stosowany w ranach głębokich i nie wymaga wypłukiwania.
- Microdacyn nie powoduje uodpornienia bakterii.
- Preparat ma obojętny odczyn pH.

Producent

OCULUS TECHNOLOG.OF MEXICO

Galeria

