

Microdacyn 60 Wound Care, roztwór do leczenia ran, 500 ml



Cena: 69,14 zł

Opis słownikowy

Dla kogo	Dla kobiet, Dla mężczyzn
Opakowanie	500 ml
Postać	Płyn
Producent	KIKGEL MIROSŁAW KIK
Przeznaczenie	Dezynfekujące, Przeciwbakteryjne, Przeciwgrzybicze, Przeciwwirusowe
Rodzaj produktu	Wyrób medyczny
Wiek	Dla dorosłych, Dla seniorów

Opis produktu

Opis

Microdacyn 60 Wound Care to roztwór do leczenia ran o pojemności 500 ml, posiadający szerokie działanie przeciwdrobnoustrojowe. Może być stosowany do przepłukiwania ucha zewnętrznego, spojówki oka, jamy ustnej oraz tkanek takich jak więzadła i ścięgna.

Wskazania

Microdacyn 60 Wound Care, roztwór jest przeznaczony do płukania ran ostrych oraz przewlekłych takich jak:

- odleżyny,
- owrzodzenia,
- rany w przebiegu stopy cukrzycowej,
- rany pooperacyjne i oparzeniowe,
- owrzodzenia nowotworowe.

Działanie

Microdacyn 60 Wound Care, roztwór do leczenia ran:

- ma szerokie spektrum skuteczności przeciwdrobnoustrojowej (wirusy, bakterie, zarodniki, grzyby),
- jest hipoalergiczny,
- ma właściwości przeciwzapalne,
- nie wymaga wypłukiwania z ran głębokich,
- bezpieczny dla zdrowych komórek,
- nie powoduje uodpornienia bakterii,
- obojętny odczyn pH,
- niweluje nieprzyjemny zapach ran,
- dopuszczony do stosowania w terapii podciśnieniowej NPWT.

Skład

40 ppm (0,004%) podchlorynu sodu, 40 ppm (0,004%) kwas podchlorawy, woda oczyszczona

Sposób użycia

- Nasączyć kompres gazowy roztworem Microdacyn i położyć bezpośrednio na ranę.
- Zabieg powtarzać 2 razy dziennie przez 15 minut oraz podczas każdej zmiany opatrunku.
- Microdacyn może być rutynowo stosowany zamiast soli fizjologicznej do przemywania ran pourazowych, ran oparzeniowych czy silnie zaleczyszczonych.
- Nasączenie przyschniętego opatrunku preparatem ułatwia jego usunięcie.

Ostrzeżenia

Stabilność i jadalność niez użytkego roztworu są gwarantowane do 60 dni po otwarciu.

Uwagi

- Nie jest konieczne dodatkowe przemywanie rany przed zastosowaniem preparatu.
- Nie jest konieczne wypłukiwanie preparatu z rany.

Producent

OCULUS TECHNOLOG.OF MEXICO

Galeria

