

Microlife BP B3 AFIB, ciśnieniomierz automatyczny, naramienny, 1 sztuka

Cena: 14,67 zł



Opis słownikowy

Dla kogo	Dla kobiet, Dla mężczyzn
Opakowanie	1 sztuka
Postać	ciśnieniomierz
Producent	CHDE POLSKA SP. S.A.
Przeznaczenie	Diagnostyczne
Rodzaj produktu	Wyrób medyczny
Wiek	Dla dorosłych, Dla seniorów

Opis produktu

Opis

Microlife BP B3 AFIB to naramienny, automatyczny ciśnieniomierz medyczny, przeznaczony dla osób od 12. roku życia. Umożliwia przeprowadzenie pojedynczego pomiaru lub trzech pomiarów w trybie MAM, które są automatycznie uśredniane w celu uzyskania najbardziej precyzyjnego wyniku. Dzięki zastosowaniu technologii AFIB, urządzenie wspomaga wykrywanie migotania przedsionków, co zwiększa bezpieczeństwo użytkownika podczas codziennej kontroli ciśnienia krwi.

Działanie

Działanie wyrobu opiera się na oscylometrycznej metodzie pomiaru ciśnienia krwi.

Przeznaczenie

Produkt przeznaczony jest dla osób dorosłych i dzieci powyżej 12. roku życia w celu samokontroli ciśnienia krwi i pulsu, wykonywanej w warunkach domowych.

Sposób użycia

Przed badaniem należy unikać nadmiernej aktywności fizycznej, palenia tytoniu i spożywania pokarmów.

- Usiądź i zrelaksuj się przez 5 minut.
- Zdejmij odzież i biżuterię, która mogłaby uciskać ramię.
- Załóż mankiet, tak aby jego dolna krawędź znajdowała się około 1-2 cm nad zgięciem łokcia, a znacznik arterii znajdował się po wewnętrznej stronie stawu łokciowego. Nie ściskaj mankieta zbyt mocno.
- Usiądź wygodnie, wyprostuj plecy, podeprzyj rękę na stole, tak aby mankiet znajdował się na wysokości serca. Stopy postaw płasko na podłodze, nie krzyżuj nóg.
- Wybierz tryb (pojedynczy lub potrójny - MAM) pomiaru.
- Włącz urządzenie za pomocą przycisku ON/OFF, nie wykonuj żadnych ruchów, nie rozmawiaj.
- Po zakończeniu pomiaru odczytaj wynik na wyświetlaczu.

- Wyłącz urządzenie.

Właściwości

Ciśnieniomierz Microlife BP B3 AFIB jest prosty w obsłudze, a wyniki wykonane przez niego wyświetlane są na dużym ekranie. Wyrób ma możliwość wykrywania nieregularnej pracy serca, a także migotania przedsionków. Funkcja ta jest szczególnie istotna w profilaktyce udaru mózgu. Technologia Gentle+ umożliwia optymalną kontrolę prędkości i wysokości ciśnienia w mankiecie. Wyrób posiada regulację daty i godziny pomiaru.

Ostrzeżenia

- Na podstawie uzyskanych wyników nie należy zmieniać dawek leków ani podejmować prób samodiagnozy i samoleczenia. Wszelkie zmiany mogą zostać wprowadzone jedynie po konsultacji z lekarzem. Osoby cierpiące na arytmie serca powinny skonsultować się z lekarzem przed użyciem urządzenia.
- Urządzenie nie nadaje się do kontroli częstotliwości pracy zastawek.
- Nie używać w pobliżu silnych pól elektromagnetycznych (emitowanych np. przez telefony komórkowe, kuchenki mikrofalowe).
- Nie używać jeśli istnieją obawy, że urządzenie jest uszkodzone.

Uwagi

- Przed zastosowaniem należy zapoznać się z instrukcją użytkowania i etykietą bądź skonsultować się z lekarzem.
- Nie stosować w przypadku uczulenia na którykolwiek ze składników wyrobu. W razie wystąpienia niepokojących objawów lub działań niepożądanych należy przerwać stosowanie wyrobu i skontaktować się z lekarzem.
- Przechowywać w temperaturze pokojowej.
- Chronić od światła i wilgoci.
- Przechowywać w sposób niedostępny dla dzieci.

Producent

Microlife AG
Espanstrasse 139
9443 Widnau