

Microlife MT 16C2, termometr elektroniczny

Cena: 29,37 zł



Opis słownikowy

Dla kogo	Dla dziecka, Dla kobiet, Dla mężczyzn
Marka	MICROLIFE
Opakowanie	1 sztuka
Postać	termometr
Producent	CHDE POLSKA SP. S.A.
Rodzaj produktu	Wyrób medyczny, Akcesoria
Wiek	Dla dorosłych, Dla dziecka, Dla młodzieży, Dla seniorów

Opis produktu

Opis

Termometr elektroniczny Microlife MT 16C2 to medyczne urządzenie służące do pomiaru temperatury ciała. Posiada czterocyfrowy wyświetlacz LCD, który umożliwia wygodne odczytywanie wyników, oraz funkcję zapamiętywania ostatniego pomiaru. Termometr jest wodoodporny i oferuje pomiar temperatury w ciągu sześćdziesięciu sekund. O gotowości do pomiaru i jego zakończeniu informuje sygnał dźwiękowy. Urządzenie automatycznie wyłącza się po zakończonym pomiarze, jeśli nie zostanie ręcznie wyłączone. Zakres pomiaru wynosi od 32,00 do 42,99 stopni Celsjusza, a termometr może być używany jako termometr owulacyjny. Zestaw zawiera termometr, plastikowe etui oraz instrukcję obsługi w języku polskim.

Zastosowanie

Do dokonywania pomiarów temperatury ciała.

Sposób użycia

Pomiar pod pachą:

1. Włącz urządzenie za pomocą przycisku ON/OFF.
2. Pulsujący symbol °C oznacza, że termometr jest gotowy do pomiaru.
3. Umieść końcówkę z czujnikiem w dole pachowym. Zalecany czas pomiaru to 3-5 minut, bez względu na sygnał dźwiękowy.
4. Wynik odczytaj na wyświetlaczu.
5. Wyłącz urządzenie.

Pomiar w jamie ustnej:

1. Włącz urządzenie za pomocą przycisku ON/OFF.
2. Pulsujący symbol °C oznacza, że termometr jest gotowy do pomiaru.
3. Umieść końcówkę z czujnikiem pod językiem (z prawej lub lewej strony). Zamknij usta i spokojnie oddychaj przez nos. Zalecany czas pomiaru to 1 minuta, po upływie tego czasu rozlegnie się sygnał dźwiękowy.
4. Wynik odczytaj na wyświetlaczu.
5. Wyłącz urządzenie.



Pomiar w odbycie

1. Włącz urządzenie za pomocą przycisku ON/OFF.
2. Pulsujący symbol °C oznacza, że termometr jest gotowy do pomiaru.
3. Umieść końcówkę z czujnikiem w odbycie na głębokość około 2-3 cm. Zalecany czas pomiaru to 1 minuta, po upływie tego czasu rozlegnie się sygnał dźwiękowy.
4. Wynik odczytaj na wyświetlaczu.
5. Wyłącz urządzenie.

Uwagi

- Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Chronić przed wysokimi temperaturami, wstrząsami i upadkami.
- Końcówkę pomiarową można myć w wodzie o temperaturze poniżej 60°C.
- Zaleca się sprawdzanie w autoryzowanym laboratorium dokładności urządzenia co 2 lata.

Producent

Microlife AG
Esenstrasse 139 9443
Widnau/ Switzerland