

Microlife MT 600, termometr elektroniczny, 1 sztuka



Cena: 25,24 zł

Opis słownikowy

Dla kogo	Dla kobiet, Dla mężczyzn
Opakowanie	1 sztuka
Postać	termometr
Producent	CHDE POLSKA S.A.
Przeznaczenie	Diagnostyczne
Rodzaj produktu	Wyrób medyczny
Wiek	Dla dorosłych, Dla dziecka, Dla młodzieży, Dla seniorów

Opis produktu

Opis

Microlife MT 600 to medyczny termometr elektroniczny, pozbawiony rtęci, wyposażony w sztywną końcówkę. Umożliwia dokonanie pomiaru temperatury ciała w czasie zaledwie 60 sekund.

Przeznaczenie

Produkt przeznaczony do pomiaru temperatury ciała u osób dorosłych i dzieci.

Sposób użycia

Pomiar temperatury pod pachą:

- Pachę należy wytrzeć suchym ręcznikiem.
- Umieścić czujnik pomiarowy pod pachą, pośrodku pachy, tak aby końcówka dotykała skóry i umieścić ramię pacjenta wzdłuż ciała.
- Z uwagi na to, że pod pachą potrzebne jest więcej czasu, aby osiągnąć stabilną temperaturę, na wynik należy poczekać co najmniej 5 minut, niezależnie od sygnału dźwiękowego.

Pomiar temperatury w ustach:

- Na 10 minut przed pomiarem nie należy spożywać ani pić gorących ani zimnych napojów.
- Usta powinny pozostać zamknięte do 2 minut przed rozpoczęciem pomiaru.
- Termometr należy umieścić pod językiem, z prawej lub lewej strony jamy ustnej. Czujnik pomiarowy musi mieć dobry kontakt z tkanką. Ponadto, usta powinny być zamknięte - oddychać należy nosem. W ten sposób unika się przedostania się powietrza do ust podczas pomiaru temperatury, co mogłoby spowodować zakłamanie w uzyskanym wyniku pomiaru temperatury. Jeśli nie jest to możliwe z powodu zatłoczonych dróg oddechowych, należy zastosować inną metodę pomiaru.
- Czas pomiaru to około 1 minuta.

Pomiar temperatury w odbycie:

- Ostrożnie umieścić czujnik pomiarowy w odbycie na głębokość ok. 2-3 cm.
- Zaleca się stosowanie osłony sondy i lubrykantu. W celu zapobiegania perforacji odbytnicy u dzieci (poniżej 3 lat) zalecamy stosowanie innej metody pomiaru lub termometru z elastyczną końcówką.
- Czas pomiaru to około 1 minuta.

Ostrzeżenia

- Przed zastosowaniem należy zapoznać się z treścią instrukcji dołączonej do opakowania wyrobu.
- Nie stosować jeśli urządzenie jest uszkodzone.
- Stosować według przeznaczenia. Nie mierzyć urządzeniem temperatury ciała w takich miejscach jak: ucho, pochwa itp.
- Nie należy wykonywać pomiarów w odbycie u osób z chorobami odbytu.
- Ze względów bezpieczeństwa (ryzyko perforacji odbytnicy) pomiar w odbytnicy u dzieci w wieku poniżej 3 lat" może być wykonywany wyłącznie przez przeszkolony personel medyczny (użytkownik profesjonalny). Zamiast tego użyj innej metody pomiaru. Do pomiaru temperatury w odbycie u małych dzieci w wieku poniżej 3 lat, dostępne są termometry z elastyczną końcówką.

Uwagi

Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci, w temperaturze pokojowej.

Producent

Microlife
P.Lukšio g. 32
08222 Vilnius