

Microlife MT 710, termometr elektroniczny piórkowy, żabka



Cena: 34,30 zł

Opis słownikowy

Dla kogo	Dla dziecka, Dla kobiet, Dla mężczyzn
Opakowanie	1 sztuka
Postać	termometr
Producent	CHDE POLSKA S.A.
Przeznaczenie	Gorączka
Rodzaj produktu	Wyrób medyczny
Wiek	Dla dorosłych, Dla dziecka, Dla młodzieży, Dla seniorów

Opis produktu

Opis

Microlife MT710 to precyzyjny termometr medyczny przeznaczony do pomiaru temperatury ciała. Jego wodoszczelna konstrukcja zapewnia trwałość i wygodę użytkowania. Ergonomiczny kształt sprawia, że jest bezpieczny i komfortowy dla dzieci. Urządzenie wyróżnia się długą żywotnością, przewidzianą na 5 lat lub aż 10 000 pomiarów.

Działanie

- O gotowości do pracy oraz o zakończeniu pomiaru informuje sygnał dźwiękowy.
- Termometr zapamiętuje wynik ostatniego pomiaru.
- Po zakończonym pomiarze, jeżeli nie zostanie wyłączony, następuje automatyczne wyłączenie w celu przedłużenia żywotności baterii.
- Termometr posiada wymienną baterię. O konieczności jej wymiany informuje graficzna ikona.

Sposób użycia

Metody pomiarowe (bazowa temperatura ciała):

- w ustach (oral) (35,5-37,5°C) - termometr należy umieścić pod językiem, z prawej lub lewej strony jamy ustnej. Czujnik pomiarowy musi mieć dobry kontakt z tkanką. Ponadto usta powinny być zamknięte - oddychamy nosem. W ten sposób unikniemy przedostania się powietrza do ust podczas pomiaru temperatury, co mogłoby spowodować przekłamania w uzyskanym wyniku pomiaru temperatury. Przybliżony czas pomiaru: 30 sekund.
- rektalna (rectal) (36,6-38,0°C) - metoda ta daje najbardziej dokładny wynik, szczególnie w przypadku niemowląt i dzieci. Ostrożnie umieść czujnik pomiarowy w odbycie na głębokość ok. 2-3 cm. Przybliżony czas pomiaru: 30 sekund.
- pod pachą (axillary) (34,7-37,3°C) - aby uzyskać bardziej wiarygodny wynik, zaleca się wykonanie pomiaru w ustach lub w odbycie. Minimalny rekomendowany czas pomiaru to 3-5 minut niezależnie od wcześniejszej sygnalizacji dźwiękowej.

Ostrzeżenia

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.



APTEKA "POD GWIAZDĄ I" SP. Z O.O.
Ul. Azalii Pontyjskiej 2A, Nowa Sarzyna
+48 500 623 943