

Microlife NC 100, termometr bezkontaktowy, 1 sztuka

Cena: 125,03 zł



Opis słownikowy

Dla kogo	Dla kobiet, Dla mężczyzn
Opakowanie	1 sztuka
Postać	termometr
Producent	CHDE POLSKA S.A.
Przeznaczenie	Diagnostyczne
Rodzaj produktu	Wyrób medyczny
Wiek	Dla dorosłych, Dla dziecka, Dla młodzieży, Dla seniorów

Opis produktu

Opis

Microlife NC 100 to bezdotykowy termometr elektroniczny, klasyfikowany jako wyrób medyczny, odpowiedni dla użytkowników w każdym wieku. Umożliwia higieniczny pomiar temperatury, nawet u dziecka podczas snu. Oprócz kontroli temperatury ciała, sprawdza się również przy pomiarze temperatury otoczenia oraz różnych przedmiotów, takich jak mleko niemowlęce czy woda do kąpieli.

Wskazania

Termometr Microlife NC 100 przeznaczony jest do regularnych pomiarów temperatury ciała ludzkiego a także obiektów i otoczenia.

Sposób użycia

Pomiar temperatury ciała:

- Wciśnij przycisk ON/OFF (wł./wył.). Wyświetlacz uaktywni się i pokaże wszystkie elementy w ciągu 2 sekund;
- Na wyświetlaczu pojawi się automatycznie na 2 sekundy wynik ostatniego pomiaru wraz z symbolem «M»;
- Kiedy zaczną migać symbole «°C» lub «°F» i zabrzmi sygnał dźwiękowy, termometr jest gotów do wykonania pomiarów;
- Wyceluj termometr na środku czoła w odległości nie większej niż 5 cm. Aby poprawić dokładność pomiaru, usuń z okolic brwi włosy, pot i brud;
- Naciśnij przycisk START i równomiernie przesuwaj termometr w kierunku skroni (około 1 cm nad łukiem brwiowym). Niebieskie podświetlenie wskazuje miejsce pokonywania pomiaru. Po 3 sekundach długi sygnał dźwiękowy potwierdzi dokonanie pomiaru. Jeżeli obszar skroni nie zostanie osiągnięty przed sygnałem dźwiękowym - powtórz pomiar przesuwając termometr nieco szybciej.
- Odczytaj z wyświetlacza ciekłokrystalicznego zapisaną wartość temperatury.
- UWAGA: Pacjent razem z termometrem powinien znajdować się w pomieszczeniu zamkniętym, w stałej temperaturze otoczenia przez co najmniej 30 minut.

Pomiar temperatury obiektu:

- Postępuj wg powyższej instrukcji, punktów 1-3. Wyceluj termometr na środek mierzonego obiektu utrzymując odległość nie

wiekszą niż 5 cm. Naciśnij przycisk rozpoczęcia pomiaru START. Po 3 sekundach długi sygnał dźwiękowy potwierdzi dokonanie pomiaru.

- Odczytaj z wyświetlacza ciekłokrystalicznego zapisaną wartość temperatury.

Właściwości

Wyrób medyczny, termometr Microlife NC 100:

- Mierzy ciepłą energię podczerwieni wydzielaną przez skórę na czole oraz przez inne obiekty. Energia ta jest następnie pochłaniana przez soczewkę i wyświetlana w postaci wartości temperatury.
- Wyniki pomiarów temperatury prowadzonych w okolicy łuku brwiowego odznaczają się najwyższą dokładnością.
- Umożliwia pomiar temperatury ciała w kilka sekund;
- Działa przy użyciu promieniowania podczerwonego (IR), dzięki czemu nie trzeba dotykać mierzonego obiektu. Pozwala to na zachowanie maksymalnej higieny i bezpieczeństwa;
- Pracuje w szerokim zakresie temperatur: od 0 - 100,0°C; więc można go używać nie tylko do pomiaru temperatury ciała, ale także do sprawdzania temperatury np. mleka w butelce dla dziecka, temperatury wody do kąpieli dla dziecka, temperatury otoczenia;
- Dzięki niepowtarzalnej budowie podzespołów oraz ulepszonemu czujnikowi na podczerwień wyrób ten zapewnia bardzo dokładny oraz wiarygodny pomiar temperatury;
- Specjalny ergonomiczny kształt zapewnia prostotę użytkowania;
- Można mierzyć temperaturę nawet podczas snu dziecka, nie budząc go;
- Pomiaru temperatury trwa bardzo krótko, co jest szczególnie przydatne podczas badania dzieci;
- Termometr ma automatyczną pamięć, wyświetla ostatni pomiar w ciągu 2 sekund po włączeniu;
- Nie ma ryzyka stłuczenia szkła lub zatrucia rtęcią;
- Czujnik można czyścić gazikiem nasączonym alkoholem, dzięki czemu termometr jest bardzo higieniczny i może być używany przez całą rodzinę.
- 10 krótkich sygnałów dźwiękowych oraz czerwone podświetlenie na wyświetlaczu ciekłokrystalicznym ostrzega pacjenta o temperaturze równej lub wyższej od 37,5°C.

Ostrzeżenia

Ostrzeżenia dotyczące pomiaru temperatury:

- Pacjent razem z termometrem powinien znajdować się w pomieszczeniu zamkniętym, w stałej temperaturze otoczenia przez co najmniej 30 minut.
- Nie należy mierzyć temperatury u dziecka podczas lub zaraz po zakończeniu karmienia.
- Nie używaj termometru w środowisku o dużej wilgotności.
- Przed pomiarem temperatury lub w jego trakcie pacjentowi nie wolno pić, jeść oraz wykonywać gwałtownych ruchów.
- Nie zabieraj przyrządu z miejsca pomiaru, dopóki nie pojawi się końcowy sygnał dźwiękowy.
- Zmocz wacik spirytusem i ostrożnie przetrzyj czujnik. Odczekaj 15 minut przed kolejnym pomiarem temperatury.
- 10 krótkich sygnałów dźwiękowych oraz czerwone podświetlenie na wyświetlaczu ciekłokrystalicznym ostrzega pacjenta o temperaturze równej lub wyższej od 37,5 °C.
- Należy zawsze dokonywać pomiaru temperatury w tym samym miejscu. Różne obszary ciała mogą dawać odmienne wyniki.
- U noworodków oraz dzieci do 6-go miesiąca życia lekarze zalecają odbytniczą metodę pomiaru. Pozostałe metody pomiaru mogą dawać niejednoznaczne wyniki. Jeżeli używasz termometru bezkontaktowego u ww dzieci zawsze weryfikuj wyniki z odczytami uzyskanymi w sposób odbytniczy.

Producent

Microlife
P.Lukšio g. 32
08222 Vilnius