

Microlife NEB 400, inhalator pneumatyczno-tłokowy dla dzieci



Cena: 186,75 zł

Opis słownikowy

Dla kogo	Dla dziecka, Dla kobiet, Dla mężczyzn
Marka	MICROLIFE
Opakowanie	1 sztuka
Postać	Inhalator
Producent	CHDE POLSKA SP. S.A.
Rodzaj produktu	Wyrób medyczny, Akcesoria
Wiek	Dla dorosłych, Dla dziecka, Dla młodzieży

Opis produktu

Opis

Inhalator pneumatyczno-tłokowy dla dzieci Microlife NEB 400 został zaprojektowany, aby uprzyjemnić zabieg inhalacji najmłodszemu, jednocześnie spełniając wysokie standardy jakości i bezpieczeństwa produktów Microlife. Urządzenie posiada efektywny system nebulizacji, a szeroki kształt pojemnika na lek zwiększa ilość leku wykorzystywanego w nebulizacji. Dzięki systemowi Venturi'ego, który zasysa powietrze atmosferyczne, tempo nebulizacji jest dodatkowo zwiększone.

Zastosowanie

Do leczenia górnych i dolnych dróg oddechowych.

Sposób użycia

- Uruchom inhalator, naciskając przycisk ON/OFF 2.
- Umieść ustnik w ustach lub dopasuj jedną z masek tak, aby objęły usta i nos.
- Podczas inhalacji, należy siedzieć prosto przy stole, aby uniknąć kompresji dróg oddechowych i osłabienia skuteczności leczenia.
- Po zakończeniu inhalacji w czasie zalecanym przez lekarza naciśnij przycisk ON/OFF 2, aby wyłączyć.
- Opróżnij zestaw inhalacyjny z pozostałego leku i wyczyść urządzenie.

Ostrzeżenia

- Nie używaj urządzenia w pobliżu łatwopalnych przedmiotów lub miejsc, w których znajdują się materiały wybuchowe.
- Nie gotuj urządzenia do nebulizacji. Może to spowodować jego uszkodzenie.
- Ustnik może być używany wyłącznie do inhalacji doustnej.

Ważne wskazówki



APTEKA "POD GWIAZDĄ I" SP. Z O.O.
Ul. Azalii Pontyjskiej 2A, Nowa Sarzyna
+48 500 623 943

- Produktu nie stosować wraz z preparatem: NEBUDOSE hialuronic.
- Należy chronić urządzenie przed kurzem, brudem i wilgocią.
- Przed użyciem urządzenie i akcesoria powinny być wyczyszczone odkażone.
- Nie używać urządzenia w bardzo zakurzonej przestrzeni.
- Przed rozpoczęciem korzystania należy upewnić się, że urządzenie i akcesoria mają temperaturę pokojową.
- Należy natychmiast wyłączyć urządzenie, jeśli jest uszkodzone lub nie działa poprawnie.

Producent

Microlife AG
Esenstrasse 139
9443 Widnau / Szwajcaria