

MiniMed Quick-Set, zestaw infuzyjny, 6 mm/110 cm, 10 sztuk

Cena: 14,67 zł



Opis słownikowy

Dla kogo	Dla diabetyków, Dla kobiet, Dla mężczyzn
Opakowanie	10 sztuk
Postać	Zestaw
Producent	MEDTRONIK INC.
Przeznaczenie	Wspomagające
Rodzaj produktu	Wyrób medyczny
Wiek	Dla dorosłych, Dla seniorów

Opis produktu

Opis

MiniMed Quick Set MMT 398 A jednorazowy zestaw infuzyjny przeznaczony do podawania insuliny podskórnie za pomocą pompy insulinowej. Kaniula ma długość 6 mm, a dren 110 cm.

Przeznaczenie

- Do podskórnego podawania insuliny w leczeniu cukrzycy.
- Wyrób został przetestowany jako zgodny z insuliną zatwierdzoną do wlewu podskórnego.

Sposób użycia

- Umyć ręce przy użyciu mydła i ciepłej wody.
- Oczyszczyć miejsce wprowadzenia środkiem dezynfekującym. Odczekać aż skóra w tym miejscu wyschnie.
- Usunąć papier ochronny z drenu. Założyć złącze drenu na górną część świeżo wypełnionego zbiornika. Przekręcać złącze zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aż do jego blokady. W przypadku złącza typu Luer-lock należy przekręcić złącze drenu aż do szczelnego zamocowania.
- Wypełnić dren insuliną według instrukcji zamieszczonej w podręczniku użytkownika pompy.
- Zdjąć papierową podkładkę z taśmy samoprzylepnej.
- Usunąć nasadkę igły, delikatnie ją skręcając i wyciągając. Należy się upewnić, że miękka kaniula nie wystaje poza igłę introduktora.
- Ścisnąć skórę i wprowadzić zestaw pod kątem 90°.
- Delikatnie rozmasować taśmę samoprzylepną na powierzchni skóry.
- Chwycić gniazdo podłączenia przy użyciu dwóch palców, delikatnie wyjąć igłę introduktora, wyciągając ją na wprost.
- Zamknąć zabezpieczenie igły poprzez naciśnięcie uchwytu aż do kliknięcia, nie dotykając jej.

Właściwości

Zestaw infuzyjny MiniMed Quick Set jest wygodny w zakładaniu i odłączaniu. Podobnie jak we wszystkich zestawach infuzyjnych, drenach i zbiornikach, w przypadku niniejszego modelu wykorzystano specjalne połączenia MiniMed, które zapewniają poprawne połączenie elementów i pewność użytkowania.

Ostrzeżenia

- Nie stosować do infuzji dożylnych.
- Zestaw nie jest przeznaczony do do infuzji krwi i preparatów krwiopodobnych.
- Nie używać zestawu infuzyjnego, jeśli opakowanie zostało otwarte lub uszkodzone. Otwarte lub uszkodzone opakowanie może być zanieczyszczone. Może to być przyczyną zakażenia. (W wypadku pomp Medtronic nie należy używać zestawu infuzyjnego, jeśli została uszkodzona igła złącza drenu).
- Pierwsze podłączenie zestawu powinno odbyć się w obecności wykwalifikowanego personelu medycznego.

Uwagi

- Przed zastosowaniem należy zapoznać się z treścią instrukcji użycia lub etykietą.
- W przypadku wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem.
- Przechowywać w temperaturze pokojowej. Chronić od światła i wilgoci.
- Przechowywać w sposób niedostępny dla dzieci.

Producent

MEDTRONIC MiniMed
Devonshire Street
91325 Norridge