

# MiniMed Quick-Set, zestaw infuzyjny, 9 mm/60 cm, 10 sztuk

Cena: 14,67 zł



## Opis słownikowy

|                 |                             |
|-----------------|-----------------------------|
| Dla kogo        | Dla kobiet, Dla mężczyzn    |
| Opakowanie      | 10 sztuk                    |
| Postać          | Zestaw infuzyjny            |
| Producent       | MEDTRONIK INC.              |
| Rodzaj produktu | Wyrób medyczny              |
| Wiek            | Dla dorosłych, Dla seniorów |

## Opis produktu

### Opis

**MiniMed Quick Set MMT 397 A** to jednorazowy zestaw infuzyjny będący wyrobem medycznym, przeznaczony do podawania insuliny podskórnie za pomocą pompy insulinowej. Kaniula ma długość 9 mm, a dren 60 cm.

### Przeznaczenie

- Do podskórnego podawania insuliny w leczeniu cukrzycy.
- Wyrób został przetestowany jako zgodny z insuliną zatwierdzoną do wlewu podskórnego.

### Sposób użycia

- Umyć ręce przy użyciu mydła i ciepłej wody.
- Oczyszczyć miejsce wprowadzenia środkiem dezynfekującym. Odczekać aż skóra w tym miejscu wyschnie.
- Usunąć papier ochronny z drenu. Założyć złącze drenu na górną część świeżo wypełnionego zbiornika. Przekręcać złącze zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aż do jego blokady. W przypadku złącza typu Luer-lock należy przekręcić złącze drenu aż do szczelnego zamocowania.
- Wypełnić dren insuliną według instrukcji zamieszczonej w podręczniku użytkownika pompy.
- Zdjąć papierową podkładkę z taśmy samoprzylepnej.
- Usunąć nasadkę igły, delikatnie ją skręcając i wyciągając. Należy się upewnić, że miękka kaniula nie wystaje poza igłę introduktora.
- Ścisnąć skórę i wprowadzić zestaw pod kątem 90°.
- Delikatnie rozmasować taśmę samoprzylepną na powierzchni skóry.
- Chwycić gniazdo podłączenia przy użyciu dwóch palców, delikatnie wyjąć igłę introduktora, wyciągając ją na wprost.
- Zamknąć zabezpieczenie igły poprzez naciśnięcie uchwytu aż do kliknięcia, nie dotykając jej.

### Ostrzeżenia

- Nie stosować do infuzji dożylnych.
- Zestaw nie jest przeznaczony do do infuzji krwi i preparatów krwiopodobnych.



- Nie używać zestawu infuzyjnego, jeśli opakowanie zostało otwarte lub uszkodzone. Otwarte lub uszkodzone opakowanie może być zanieczyszczone. Może to być przyczyną zakażenia. (W wypadku pomp Medtronic nie należy używać zestawu infuzyjnego, jeśli została uszkodzona igła złącza drenażu).

#### Uwagi

- Przed zastosowaniem należy zapoznać się z treścią instrukcji użycia lub etykietą.
- W przypadku wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem.
- Przechowywać w temperaturze pokojowej. Chronić od światła i wilgoci.
- Przechowywać w sposób niedostępny dla dzieci.

#### Producent

MEDTRONIC MiniMed  
Devonshire Street  
91325 Norridge