

MultiPlast, paski do zamykania ran, 6 sztuk

Cena: 7,13 zł



Opis słownikowy

Dla kogo	Dla kobiet, Dla mężczyzn
Opakowanie	6 sztuk
Postać	Opatrunek
Producent	ALIDA SP. Z O.O.
Przeznaczenie	Ochronne
Rodzaj produktu	Wyrób medyczny
Wiek	Dla dorosłych, Dla młodzieży, Dla seniorów

Opis produktu

Opis

MultiPlast Paski to nieinwazyjne rozwiązanie do zamykania i zabezpieczania drobnych ran oraz skaleczeń. Trwała, oddychająca włóknina pomaga utrzymać brzoży rany zamknięte, co wspomaga proces gojenia się bez potrzeby używania szwów.

Zastosowanie

Nieinwazyjne zabezpieczenie i zamykanie drobnych ran i skaleczeń.

Sposób użycia

- Umyj ręce przed zastosowaniem pasków.
- Oczyszczyć i zdezynfekować ranę, a następnie ostrożnie osuszyć. Zadbaj, by miejsce wokół rany było czyste i suche.
- Wyjmij paski z saszetki.
- Zamocuj pasek, zbliżając do siebie krawędzie zranionej skóry.
- Nie naprężaj paska. Delikatnie dociśnij, aby pasek dobrze przywarł do skóry.
- Następnie nałóż kolejne paski, zachowując odstępy ok. 3-5 mm, jednak nie większe niż 1 cm.
- W celu usunięcia plastra, delikatnie odklej oba końce w kierunku rany.

Ostrzeżenia

- Paski do zamykania ran sterylne wewnątrz opakowania bezpośredniego.
- Wyrób sterylny, jeśli opakowanie nie jest uszkodzone.
- Nie używać w przypadku uszkodzenia opakowania.
- Wyrób przeznaczony do użytku zewnętrznego.
- Nie stosować pasków na głębokie i rozległe rany.
- W przypadku infekcji lub stanu zapalnego należy skonsultować się z lekarzem przed aplikacją wyrobu.
- W przypadku wystąpienia podrażnienia wysięku lub krwawienia z rany należy usunąć paski i skonsultować się z lekarzem.



APTEKA "POD GWIAZDĄ I " SP. Z O.O.
Ul. Azalii Pontyjskiej 2A, Nowa Sarzyna
+48 500 623 943

Producent

Silesian Pharma Sp. z o.o.
ul. Szopienicka 77
40-431 Katowice, Polska