

Mustico Tick-Off, spray do usuwania kleszczy 2w1, 8 ml

Cena: 28,76 zł



Opis słownikowy

Dla kogo	Dla dziecka, Dla kobiet, Dla mężczyzn
Opakowanie	8 ml
Postać	Spray
Producent	BIOVENA HEALTH SP. Z O.O.
Przeznaczenie	Kleszcze
Rodzaj produktu	Wyrób medyczny
Wiek	Dla dorosłych, Dla dziecka, Dla młodzieży, Dla seniorów, Od 3 lat

Opis produktu

Opis

Mustico Tick-Off spray na skórę to wyrób medyczny przeznaczony do bezbolesnego usuwania kleszczy. Nietoksyczny produkt umożliwia bezpieczne usunięcie kleszcza. Opakowanie zawiera zamrażający spray oraz pęsetę, zapewniając wszystko, co niezbędne do zabiegu. Bezpieczny dla dzieci powyżej 3. roku życia.

Działanie

Kleszcz usuwany metodą tradycyjną (mechaniczną), często ulega uszkodzeniu, a podrażniony może „wydalić” nagromadzone płyny do organizmu żywiciela i tym samym zarazić go chorobami zakaźnymi. Wyrób medyczny Mustico® Tick-Off jest nietoksyczny i bezpieczny. Jego działanie polega na natychmiastowym zamrożeniu kleszcza, powodując wycofanie jego aparatu gębowego z ciała żywiciela, minimalizując ryzyko przeniesienia chorób zakaźnych.

Skład

1,1,1,2 - tetrafluoroetan.

Sposób użycia

- Wycelować końcówkę rurki dozującej umieszczonej u góry pojemnika w część głowową kleszcza wbłą w skórę nosiciela.
- Spryskać, aż strumień się zatrzyma. Do skutecznego zabicia kleszcza niezbędne jest od 1 do 3 rozpyleń. Nie należy przekraczać 3 rozpyleń na miejsce.
- Rozpylona ilość środka natychmiast zamrozi kleszcza i powoduje wycofanie narządu gębowego. Chwycić kleszcza za pomocą pęsety. Lekko poruszyć na boki i usunąć.
- Zdezynfekować miejsce po usunięciu kleszcza.
- Pęsetę po wykonanym zabiegu należy zdezynfekować.

Ostrzeżenia

- Przed zastosowaniem należy zapoznać się z treścią instrukcji użycia lub etykiety.



- Nie stosować w przypadku uczulenia na którykolwiek ze składników wyrobu. W razie wystąpienia niepokojących objawów lub działań niepożądanych należy przerwać stosowanie wyrobu i skontaktować się z lekarzem.
- Przechowywać w sposób niedostępny dla dzieci.
- Chronić przed działaniem wysokich temperatur, światła słonecznego, wilgoci.
- Tylko do użytku zewnętrznego.
- Nie stosować, jeśli opakowanie było wcześniej otwierane lub uszkodzone.

Uwagi

Przed usunięciem kleszcz mógł już wprowadzić ślinę z chorobotwórczymi drobnoustrojami, dlatego należy obserwować miejsce po wbiciu kleszcza. W momencie pojawienia się zmian skórnych (np. rumień), czy innych niepokojących objawów chorobowych należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem.

Producent

BIOVENA
Odrowąża 15
Warszawa