

Nexcare ColdHot Therapy Pack Happy Kids, zimno-ciepły okład żelowy wielokrotnego użytku, 11 cm x 12 cm, 2 sztuki



Cena: 56,00 zł

Opis słownikowy

Dla kogo	Dla dziecka, Dla kobiet, Dla mężczyzn
Opakowanie	2 sztuki
Postać	Okład żelowy
Producent	3M POLAND SP. Z O.O.
Przeznaczenie	Chłodzące, Rozgrzewające
Rodzaj produktu	Wyrób medyczny
Wiek	Dla dorosłych, Dla dziecka, Dla młodzieży

Opis produktu

Opis

Nextcare ColdHot Therapy Pack Happy Kids to wyrób medyczny w postaci żelowych okładów wielokrotnego użytku, które można stosować zarówno na ciepło, jak i na zimno.

Wskazania

- Stosowanie na ciepło zalecane jest w trakcie bóli wzrostowych, bólu brzucha wywołanego napięciem mięśniowym oraz do ogrzewania dłoni.
- Stosowanie na zimno zaleca się podczas bólu zębów, urazów (takich jak siniaki, skręcenia, stłuczenia, guzy), krwotoków z nosa, w trakcie gorączki oraz do zmniejszenia opuchlizny powstałej na skutek ukąszenia przez owady.

Działanie

- Kompres żelowy stosowany na ciepło pomaga zmniejszyć ból towarzyszący skurczom mięśni, bóle miesiączkowe oraz ból wzrostowy u dzieci. Produkt może być także używany w formie termoforu. Działa także relaksująco i uspokajająco.
- Kompres żelowy na zimno pomaga zmniejszyć obrzęk, stan zapalny oraz ból związany z urazami (stłuczenie, skręcenie, siniaki, guzy). Działa łagodząco na ból zębów, krwawienie z nosa, opuchliznę spowodowaną ukąszeniem przez owady, a także podczas gorączki.

Przeznaczenie

Produkt przeznaczony jest dla dzieci i osób dorosłych. Do powierzchniowego ochłodzenia lub ogrzania bolesnych części ciała.

Sposób użycia

Stosowanie na ciepło:

1. Podgrzej kompres (KUCHENKA MIKROFALOWA: żelowy kompres połóż płasko w mikrofalówce, podgrzewaj 20 sekund przy użyciu

- mocy 640 W. GORĄCA WODA: zagotuj wodę i zdejmij ją z źródła ciepła. Zanurz kompres żelowy w wodzie na około 60 sekund).
2. Ostrożnie wyjmij kompres (z mikrofalówki lub gorącej wody) i ugniataj żel aby równomiernie rozprowadzić ciepło.
 3. Włóż kompres do pokrowca.
 4. Aplikuj na skórę białą włókninową stroną lub owić okład w ręcznik.
 5. Przykładaj do bolącego miejsca, aż do momentu uczucia dyskomfortu.
 6. Jeśli okład osiągnie temperaturę pokojową, w celu dalszego użytkowania należy go ponownie podgrzać.

Stosowanie na zimno:

1. Umieść kompres żelowy w lodówce lub zamrażarce na co najmniej 2 godziny.
2. Włóż kompres do pokrowca.
3. Aplikuj na skórę białą włókninową stroną lub owić okład w ręcznik.
4. Przykładaj okład do skóry przez 20 minut. Powtórne zastosowanie można przeprowadzić po odczekaniu kolejnych 20 minut.

Przeciwwskazania

- Produkt tylko do użytku zewnętrznego.
- Nie stosować na wrażliwą lub uszkodzoną skórę oraz u osób z podejrzeniem lub stwierdzonymi problemami z krążeniem.
- Nie stosować okładu bezpośrednio na skórę: gorący okład może spowodować oparzenie, zimny - odmrożenia. Przed aplikacją zawsze należy założyć pokrowiec.
- Nie należy podgrzewać okładów, które są złożone, zgięte lub zamrożone.
- Nie podgrzewać w piekarniku ani na grillu.
- Produkt nie jest przeznaczony do ciągłego podgrzewania - przegrzanie może spowodować uszkodzenie.
- Jeśli moc kuchenki mikrofalowej jest nieznana należy ustawić najniższą możliwą moc (odmrażanie) i podgrzewać kompres w 20-sekundowych seriach.
- Nie używać w przypadku uszkodzenia okładu, gdy żel stał się płynny lub w przypadku wycieku.
- Nie siadać na kompresie, nie wywieraj na niego nacisku, gdyż może pęknąć.

Uwagi

- Przed zastosowaniem należy zapoznać się z instrukcją użytkowania i etykietą bądź skonsultować się z lekarzem, gdyż ten wyrób może być nieodpowiedni dla Ciebie.
- Nie stosować w przypadku uczulenia na którykolwiek ze składników wyrobu. W razie wystąpienia niepokojących objawów lub działań niepożądanych należy przerwać stosowanie wyrobu i skontaktować się z lekarzem.
- Przechowywać w temperaturze pokojowej.
- Chronić od światła i wilgoci.
- Przechowywać w sposób niedostępny dla dzieci.
- Tylko do użytku zewnętrznego.

Producent

3M DEUTSCHLAND GMBH
Carl-Schurz-Straße 1
Neuss, Niemcy

Galeria

