

# NOVA T 380 wkładka antykoncepcyjna 1 sztuka

Cena: 122,28 zł



## Opis słownikowy

Dla kogo	Dla kobiet
Opakowanie	1 sztuka
Postać	Wkładka antykoncepcyjna
Producent	SCHERING AG
Przeznaczenie	Antykoncepcja
Rodzaj produktu	Wyrób medyczny
Wiek	Dla dorosłych

## Opis produktu

### Opis

NovaT 380 Cu380Ag, wkładka antykoncepcyjna, 1 sztuka  
Wyrób medyczny,  
Wkładka wewnątrzmaciczna zawierająca miedź,  
Do zakładania wyłącznie przez wykwalifikowany personel medyczny.

### Działanie

Wyrób medyczny, wkładka NovaT 380 Cu380Ag:

- Ma działanie antykoncepcyjne,
- Działa lokalnie, wewnątrz macicy, uniemożliwiając zapłodnienie.
- Dzięki zawartości miedzi, wkładka działa hamująco na plemniki, komórkę jajową i transport komórki jajowej do jajowodu.
- Jest zatwierdzona do używania przez okres do pięciu lat.
- Wkładka zapewnia ochronę od momentu założenia, natomiast po jej wyjęciu można zajść w ciążę.

### Skład

Miedź, srebro, polietylen, baru siarczan, żelaza tlenek (E 172).

### Sposób użycia

- Wkładkę antykoncepcyjną NovaT 380 Cu380Ag umieszcza się wewnątrz macicy. Zabieg ten może wykonać wyłącznie lekarz!
- W celu uzyskania dodatkowych informacji, należy skonsultować się z lekarzem i zapoznać z treścią ulotki dołączonej do opakowania.
- Podczas całego okresu stosowania wyrobu, należy stosować się do zaleceń lekarza.

### Przeciwwskazania

Nie należy stosować wkładki wewnątrzmacicznej NovaT 380 Cu380Ag:

- W przypadku stwierdzenia, lub podejrzenia ciąży,
- Przy stanach zapalnych narządów rodnych, lub przy dużym ryzyku ich wystąpienia,
- W przypadku zapalenia macicy w okresie trzech miesięcy po porodzie, poronieniu lub usunięciu ciąży,
- Podczas krwawienia z narządów rodnych, jeśli nie zna się ich przyczyny,

Przeciwwskazanie do stosowania wkładki mogą stanowić również:

- Obfite miesiączki,
- Anemia,
- Mięśniaki macicy.

W następujących przypadkach skonsultuj się z lekarzem:

- Na regularne wizyty kontrolne,
- W przypadku bólu i skurczów w dole brzucha,
- W przypadku zasłabnięcia,
- Przy podejrzeniu infekcji (może się ona objawiać bólem, gorączką, upławami),
- Przy opóźnieniu miesiączki lub podejrzeniu ciąży,
- W przypadku przesunięcia wkładki, lub kiedy nie wyczuwasz w pochwie nitek wkładki,
- Przy silnych lub nietypowych krwawieniach, lub zmianie przebiegu menstruacji.

**Producent**  
SCHERING AG  
Migdałowa 4  
Warszawa