

O.B. ProComfort Mini, tampony, 8 sztuk



Cena: 11,16 zł

Opis słownikowy

Dla kogo	Dla kobiet
Opakowanie	8 sztuk
Postać	tampon
Producent	JOHNSON & JOHNSON POLAND SP. Z O.O.
Przeznaczenie	Menstruacja
Rodzaj produktu	Wyrób medyczny, Akcesoria
Wiek	Dla dorosłych, Dla młodzieży

Opis produktu

Opis

Nowe tampony **o.b. ProComfort Mini** zapewniają wyjątkowy komfort i niezawodną ochronę. Dzięki technologii Dynamic Fit z 3D Expansion doskonale dopasowują się do kształtu ciała i efektywnie wchłaniają płyn, kierując go przez splecione rowki do wnętrza i w górę tamponu. Wyposażone w gładką otoczkę SilkTouch, co ułatwia ich aplikację. Idealne na dni o skąym krwawieniu.

Przeznaczenie

Odpowiednie na dni o skąym krwawieniu.

Sposób użycia

- Dokładnie umyj i osusz ręce.
- Odpakuj tampon z folii ochronnej, rozwiń sznureczek i chwyć tampon tak, aby palec wskazujący znajdował się we wgłębieniu na końcu tamponu.
- Rozluźnij się, przykucnij, lub oprzyj jedną nogę na brzegu wanny lub toalety.
- Umieść tampon w pochwie, kierując jego wierzchołek nieco ku tyłowi ciała.
- Sznureczek powinien zwisać swobodnie na zewnątrz ciała.
- Aby wyjąć tampon, pociągnij za sznureczek.
- Tampon należy zmieniać nie rzadziej, niż co 4-8 godzin.

Uwagi

Uwaga: Załączona instrukcja użycia tamponów zawiera ważne informacje dotyczące menstruacyjnego TSS, rzadkiej, ale poważnej choroby. Proszę przeczytać ją i zachować ze względów bezpieczeństwa i higieny.

Producent

JOHNSON & JOHNSON CONSUMER HEALTH
Val de Reuil F-27100
Issy-les-Moulineaux, Francja

Galeria

