


O.B. ProComfort Super, tampony, 8 sztuk

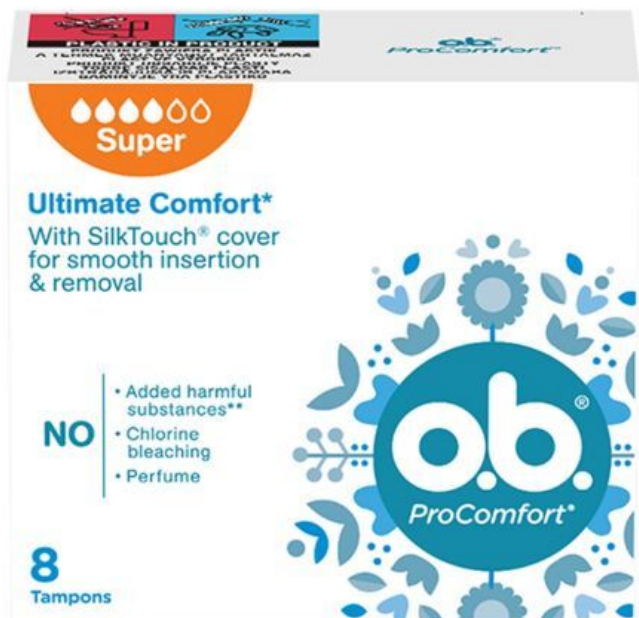

Cena: 11,16 zł

Opis słownikowy

Dla kogo	Dla kobiet
Opakowanie	8 sztuk
Postać	tampon
Producent	JOHNSON & JOHNSON POLAND SP. Z O.O.
Przeznaczenie	Menstruacja
Rodzaj produktu	Wyrób medyczny, Akcesoria
Wiek	Dla dorosłych, Dla młodzieży

Opis produktu

Opis

Tampony o.b. ProComfort Super są proste w aplikacji i oferują doskonałą ochronę dzięki technologii Dynamic Fit z 3D Expansion, która umożliwia im pęcznienie i precyzyjne dopasowanie do kształtu ciała. System splecionych rowków skutecznie kieruje płyn do wnętrza i w górę tamponu, minimalizując ryzyko przeciekania. Gładka powłoka SilkTouch ułatwia zarówno aplikację, jak i usuwanie tamponu.

Przeznaczenie

Do utrzymania higieny osobistej w czasie menstruacji. Tampony o chłonności "super" są polecane na dni o obfitym krwawieniu.

Sposób użycia

- Dokładnie umyj i osusz ręce.
- Odpakuj tampon z folii ochronnej, rozwiń sznureczek i chwyć tampon tak, aby palec wskazujący znajdował się we wgłębieniu na końcu tamponu.
- Rozluźnij się, przykucnij, lub oprzyj jedną nogę na brzegu wanny lub toalety.
- Umieść tampon w pochwie, kierując jego wierzchołek nieco ku tyłowi ciała.
- Sznureczek powinien zwisać swobodnie na zewnątrz ciała.
- Aby wyjąć tampon, pociągnij za sznureczek.
- Tampon należy zmieniać nie rzadziej, niż co 4-8 godzin.

Właściwości

- Cechy tamponów o.b. ProComfort super:
- Wysoka chłonność - polecane na dni o obfitym krwawieniu,
- System splecionych rowków, kierujących płyn do wnętrza i w górę tamponu,
- Tampon pęcznieje, optymalnie dostosowując się do kształtu ciała,
- Jedwabista otoczka SilkTouch zapewnia komfortową i łatwą aplikację i usuwanie tamponu.

Uwagi

- Uwaga: Załączona instrukcja użycia tamponów zawiera ważne informacje dotyczące menstruacyjnego TSS (zespołu wstrząsu toksycznego), rzadkiej, ale poważnej choroby. Proszę przeczytać ją i zachować ze względów bezpieczeństwa i higieny.
- Nie wolno pozostawiać tamponu w pochwie dłużej, niż 8 godzin.
- Zawsze wybieraj tampony o najmniejszej chłonności odpowiedniej dla Twoich potrzeb.

Producent

JOHNSON & JOHNSON CONSUMER HEALTH
Val de Reuil F-27100
Issy-les-Moulineaux, Francja

Galeria

