

# Olivocap, spray do usuwania woskowiny usznej, 40 ml

Cena: 27,98 zł



## Opis słownikowy

|                 |                                                         |
|-----------------|---------------------------------------------------------|
| Dla kogo        | Dla kobiet, Dla mężczyzn                                |
| Opakowanie      | 40 ml                                                   |
| Postać          | spray do uszu                                           |
| Producent       | CAPEYPHARMA SP. Z O.O. S.K.                             |
| Przeznaczenie   | Nawilżające, Oczyszczające                              |
| Rodzaj produktu | Wyrób medyczny                                          |
| Wiek            | Dla dorosłych, Dla dziecka, Dla młodzieży, Dla seniorów |

## Opis produktu

### Opis

**Olivocap** to medyczny spray przeznaczony do bezpiecznego usuwania woskowiny usznej u niemowląt powyżej 3. miesiąca życia, dzieci oraz dorosłych. Produkt nie tylko skutecznie rozpuszcza nagromadzoną woskowinę, ale również nawilża przewód słuchowy i przeciwdziała jej ponownemu odkładaniu się. Wykazuje działanie wspomagające naturalne oczyszczanie ucha i nie zawiera wody ani konserwantów, co czyni go delikatnym i odpowiednim nawet dla wrażliwych uszu.

### Wskazania

Spray do uszu Olivocap przeznaczony jest do oczyszczania z woskowiny. Wspomaga usuwanie korków woskowinowych, zapobiega ponownemu ich powstawaniu oraz wspiera naturalny proces samooczyszczania ucha z woskowiny.

### Skład

Squalan, olej z oliwek, olejek miętowy

### Sposób użycia

- Przy korku woskowinowym: rozpylić 1-2 dawki do ucha od 3 do 5 razy dziennie, aż do rozpuszczenia woskowiny.
- Profilaktycznie: rozpylić 1-2 dawki do każdego ucha od 1 do 2 razy w tygodniu jako zapobieganie tworzenia się korków woskowinowych lub rozpylić 1-2

dawki do każdego ucha bezpośrednio przed kąpielą w basenie lub innym akwenu wodnym.

- Kanał ucha nie wymaga przepłukiwania po zastosowaniu preparatu.

### Przeciwwskazania

- Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek składnik preparatu.
- Nie stosować u pacjentów z perforacją błony bębenkowej.



APTEKA "POD GWIAZDĄ I" SP. Z O.O.  
Ul. Azalii Pontyjskiej 2A, Nowa Sarzyna  
+48 500 623 943

- Unikać kontaktu z oczami.
- Po użyciu końcówkę aplikatora umyć pod bieżącą wodą.
- Przechowywać w pozycji pionowej w temperaturze 15-25oC.
- Chronić przed bezpośrednim wpływem światła słonecznego.
- Przechowywać w sposób niedostępny dla dzieci.

**Producent**

CAPEYPHARMA SP. Z O.O.  
KLAUDYNY 28 C  
01-684 WARSZAWA