

Opatrunek Aquacel Extra Hydrofiber, 10cm x 10cm

Cena: 15,35 zł



Opis słownikowy

Dla kogo	Dla dziecka, Dla kobiet, Dla mężczyzn
Opakowanie	1 sztuka
Postać	Opatrunek
Producent	CONVATEC LTD.
Rodzaj produktu	Wyrób medyczny
Wiek	Dla dorosłych, Dla dziecka, Dla młodzieży, Dla seniorów

Opis produktu

Opis

AQUACEL Extra to opatrunek hydrowłóknisty przeznaczony do pielęgnacji ran niezainfekowanych. Jest odpowiedni do ran o różnej głębokości i natężeniu wysięku, zarówno głębokich, jak i płytkich, z dużym lub umiarkowanym wysiękiem. Po absorpcji wysięku opatrunek zmienia się w żel. **AQUACEL Extra Hydrofiber** występuje w rozmiarze 10 cm x 10 cm, a w jednym opakowaniu znajduje się 1 sztuka.

Działanie

Wilgotne środowisko gojenia ran oraz skuteczność na szerokie spektrum bakterii występujących w ranach wspiera proces gojenia i pomaga zmniejszyć ryzyko infekcji. Srebro jonowe w opatrunku zabija patogenne mikroorganizmy, zarówno planktonowe i wchodzące w skład biofilmu bakteryjnego oraz drożdżaki i pleśnie. Opatrunek również działa na biofilm, pochłania go oraz zapobiega jego odbudowie / poprawia i zwiększa skuteczność działania srebra na mikroorganizmy. Opatrunek zapewnia również barierę antybakteryjną chroniącą łóżysko rany.

Aquacel Extra wzmocniony opatrunek w Technologii Hydrofiber z dodatkiem srebra może być stosowany zgodnie z instrukcją użytkowania w ranach:

- rany, w których zastosowanie opatrunku stanowiącego barierę dla penetracji bakterii pomaga zmniejszyć ryzyko infekcji
- rany zainfekowane lub ze zwiększonym ryzykiem infekcji;
- owrzodzenia w przebiegu stopy cukrzycowej, owrzodzenia goleni: żyłne, tętnicze i o mieszanej etiologii oraz odleżyny (pośredniej i pełnej grubości);
- rany chirurgiczne;
- rany pourazowe;
- rany narażone na krwawienie, np. na skutek mechanicznego lub chirurgicznego oczyszczenia;
- rany onkologiczne z wysiękiem, np. ziarniaki - guzy skórne, rak grzybiasty, przerzuty skórne, mięsak Kaposiego, mięsak naczyńniowy
- rany, w których bakterie są prawdopodobną przyczyną wolniejszego procesu leczenia, bądź te, w których nie obserwuje

Skład



Opatrunek Aquacel Extra jest wzmocnionym opatrunkiem wykonanym w Technologii Hydrofiber z dodatkiem srebra. Jest miękkim, sterylnym opatrunkiem, składającym się z włókien wykonanych w Technologii Hydrofiber zawierającym 1,2% srebra jonowego (środek przeciwbakteryjny), wzmocnionym kwasem etylenodiaminotetraoctowym, di-octową solą sodową (EDTA) oraz chlorkiem benzetonowym (BeCl).

Przeciwwskazania

Aquacel Extra wzmocniony opatrunek w Technologii Hydrofiber z dodatkiem srebra nie powinien być stosowany u osób, które są wrażliwe lub mają alergię na składniki opatrunku takie jak srebro, kwas etylenodiaminotetraoctowy, di-octową sól sodową (EDTA) oraz chlorek benzetonowy (BeCl).

Ostrzeżenia

- UWAGA: Gwarantowana jest sterylność opatrunku, o ile sterylne opakowanie zawierające opatrunek nie zostało uszkodzone, lub nie było otwarte przed jego użyciem. W przypadku uszkodzenia bezpośredniego opakowania, opatrunku nie należy używać.
- Produkt do jednorazowego użytku. Ponowne użycie może wpłynąć na zwiększenie ryzyka infekcji oraz zakażenia krzyżowego. Fizyczne właściwości opatrunku mogą w przypadku powtórnego użycia nie zostać zachowane.
- W następstwie procesu sterylizacji w momencie otwarcia opakowania może wystąpić przykry zapach.
- W przypadku głębokich, drążących ranach włączając przetoki zaleca się zastosowanie opatrunku AQUACEL Ag+ wzmocnionego opatrunku w Technologii Hydrofiber™ z dodatkiem srebra.
- W czasie normalnego procesu gojenia tkanka martwica jest usuwana z rany (w wyniku autolizy/ samooczyszczania), co może początkowo sprawiać wrażenie powiększania się rany.
- Opatrunek może być przycinany w dowolnym kierunku
- Jeśli zdejmowanie opatrunku sprawia trudności, należy całkowicie nasączyć opatrunek roztworem soli fizjologicznej lub wodą, aż da się powoli usunąć.
- Ponieważ opatrunek AQUACEL EXTRA wzmocniony opatrunek w Technologii Hydrofiber z dodatkiem srebra wytwarza wilgotne środowisko ułatwiające rozwój nowych naczyń krwionośnych, na skutek czego w niektórych przypadkach delikatne nowoutworzone naczynia mogą być źródłem wysięku o krwawym zabarwieniu
- Opatrunek ten nie jest przeznaczony do stosowania w połączeniu z produktami na bazie oliwy, jak np. wazelina
- Informacje na temat zalecanych opatrunków wtórnych znajdują się w instrukcji użytkowania.
- Tam, gdzie jest to wskazane, należy stosować odpowiednie środki wspomagające (np. stosowanie stopniowanej siły nacisku przy opatrywaniu owrzodzeń żylnych goleni lub środków łagodzenia nacisku przy opatrywaniu odleżyn, antybiotyki systemowe i częste kontrole w leczeniu infekcji w ranie, eliminacja nacisku i kontrola poziomu cukru we krwi w przypadku stopy cukrzycowej itp.).
- Opatrunek ten nie jest przeznaczony do użycia jako gąbka chirurgiczna.
- Klinicyści / Pracownicy służby zdrowia powinni być świadomi, że liczba danych w zakresie przedłużonego i powtórnego użycia opatrunków z zawartością srebra jest ograniczona, szczególnie wśród dzieci i noworodków.

Producent

ConvaTec Polska Sp. z o.o.
Al. Armii Ludowej 26
00-609 Warszawa