

Opatrunek ConvaMax Superabsorber, przylepny, 15 cm x 15 cm, 1 sztuka



Cena: 29,04 zł

Opis słownikowy

| | |
|-----------------|----------------------------|
| Dla kogo | Dla kobiet, Dla mężczyzn |
| Opakowanie | 1 sztuka |
| Postać | Opatrunek |
| Producent | CONVATEC POLSKA SP. Z O.O. |
| Przeznaczenie | Nawilżające, Ochronne |
| Rodzaj produktu | Wyrób medyczny |
| Wiek | Dla dorosłych |

Opis produktu

Opis

ConvaMax Superabsorber to jałowy opatrunek z superabsorbentem, który jest przylepny i przeznaczony do ról na ranach z dużym wylewem płynu, takich jak owrzodzenia kończyn dolnych, odleżyny, owrzodzenia stopy cukrzycowej i rany pooperacyjne z rozejściem się brzegów. Składa się on z trójwarstwowej konstrukcji, w której przepuszczająca powietrze i wodoodporna warstwa włókniny z superabsorbentem pomaga w utrzymaniu optymalnego środowiska wilgotnego wokół rany, przyspieszając tym samym proces gojenia. Warstwa chłonna posiada wysokie właściwości absorpcyjne i zatrzymuje wylewki, minimalizując ryzyko maceracji i uszkodzenia skóry w okolicy rany.

Sposób użycia

- Po oczyszczeniu rany należy dobrać opatrunek o właściwym rozmiarze, aby zapewnić odpowiedniopokrycie rany i jej brzegów.
- ConvaMax Superabsorber, opatrunek z superabsorbentem, przylepny, może być stosowany zarówno jako opatrunek pierwotny, jak również jako opatrunek wtórny (pokrywający). W przypadku stosowania ConvaMax Superabsorber, opatrunku z superabsorbentem, przylepnego, jako opatrunku pierwotnego, należy zapewnić bliski kontakt opatrunku z łóżyskiem rany w celu poprawnej absorpcji płynu z rany. Biała warstwa kontaktowa powinna stykać się ze skórą, a niebieska wodoodporna wierzchnia warstwa powinna znajdować się z dala od ciała.
- W przypadku uzasadnionym klinicznie, opatrunek należy zabezpieczyć odpowiednio bandażem podtrzymującym, taśmami lub bandażem uciskowym.
- Częstotliwość zmiany opatrunku zależy od poziomu wysięku.
- Zdejmowanie opatrunku można ułatwić, zwilżając go roztworem soli fizjologicznej.
- Opatrunek należy utylizować jako odpady medyczne. W przypadku kontaminacji należy postępować zgodnie z lokalnymi przepisami.

Przeciwwskazania



- Nie należy stosować tego produktu na rany suche lub z małym wysiękiem, oczy, błony śluzowe lub w jamach rany, ponieważ opatrunek puchnie podczas absorpcji.
- Opatrunku nie należy stosować na oparzenia trzeciego stopnia.
- ConvaMax Superabsorber, opatrunek z superabsorbentem, przylepny, nie powinien być stosowany u pacjentów ze stwierdzoną alergią lub nadwrażliwością na opatrunek lub jego składniki.
- Krwawienia tętnicze i mocno krwawiące rany.

Ostrzeżenia

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

- Nie używać ponownie.
- Nie należy używać opatrunku, jeśli jałowe opakowanie jest uszkodzone lub otwarte.
- Nie należy przecinać opatrunku, osłona musi pozostać nienaruszona.
- Produkt należy przechowywać w chłodnym i suchym miejscu z dala od światła.