

Opatrunek hydrokoloidowy GRANUFLEX 10x10cm, 1 sztuka

Cena: 7,77 zł



Opis słownikowy

Dla kogo	Dla kobiet, Dla mężczyzn
Opakowanie	1 sztuka
Postać	Opatrunek
Producent	CONVATEC POLSKA SP. Z O.O.
Przeznaczenie	Ochronne
Rodzaj produktu	Wyrób medyczny
Wiek	Dla dorosłych, Dla seniorów

Opis produktu

Opis

Granuflex to opatrunek hydrokoloidowy stosowany zarówno na rany przewlekłe (takie jak odleżyny i owrzodzenia), jak i na rany ostre oraz częściowe oparzenia (stopnia I-IIa). Opatrunek ten może być używany na każdym etapie leczenia, w tym na rany z martwicą suchą lub rozpułającą się. Granuflex zapewnia ranie odpowiednio wilgotne środowisko, jednocześnie wchłaniając nadmiar wysięku. Jego stosowanie przyspiesza proces gojenia ran.

Wskazania

Leczenie ran przewlekłych, ostrych i trudno się gojących

Składniki

Substancja czynna– aktywny hydrokoloid czasteczki karboksymetylocelulozy (20%), żelatyny (20%) i pektyny (20%), zawieszone w masie hydrofobowego poliisobutyleny sodowego (40%).

Sposób użycia

Opatrunek Granuflex nakłada się na rany zdezynfekowane roztworem dowolnej substancji, nie opisano interakcji między znanymi środkami dezynfekującymi a aktywnym hydrokoloidem. Opatrunek nakładać na powierzchnie osuszone uprzednio jałową gazą. Musi on zajmować margines skóry nieuszkodzonej (około 2–3 cm). Opatrunek hydrokoloidowy należy zmienić, gdy zaczynają się spod niego wydobywać nadmierne ilości wysięku, uniemożliwiające prawidłowe funkcjonowanie i higienę pacjenta. W zależności od stopnia wilgotności rany następuje to zwykle między 2 a 6 dniem od momentu założenia opatrunku na ranę. Opatrunki hydrokoloidowe można łatwo przycinać, by dostosować je do kształtu, wielkości i lokalizacji rany. Warstwa wewnętrzna opatrunku jest samoprzylepna, nie wymaga więc on dodatkowego mocowania na ranie.

Ostrzeżenia

- Rany powinny być poddawane regularnej kontroli
- Produkt jednorazowego użytku
- Produkt do użytku zewnętrznego



APTEKA "POD GWIAZDĄ I" SP. Z O.O.
Ul. Azalii Pontyjskiej 2A, Nowa Sarzyna
+48 500 623 943

Producent
CONVATEC
Armii Ludowej 26
Warszawa