

Opatrunek z jodyną Smith&Nephew Iodosorb Dressing 4 cm x 6 cm, 1 sztuka



Cena: 30,30 zł

Opis słownikowy

Dla kogo	Dla kobiet, Dla mężczyzn
Opakowanie	1 sztuka
Postać	Opatrunek
Producent	SMITH & NEPHEW SP. Z O.O
Przeznaczenie	Przeciwbakteryjne, Wspomagające
Rodzaj produktu	Wyrób medyczny
Wiek	Dla dorosłych, Dla seniorów

Opis produktu

Opis

Iodosorb Dressing to opatrunek medyczny zawierający 0,9% jodynę. Jest zalecany do stosowania na rany, zarówno zainfekowane, jak i niezainfekowane, które charakteryzują się obfitym lub bardzo obfitym wysiękiem.

Wskazania

Opatrunek Iodosorb wskazany jest do stosowania na rany pokryte tkanką martwiczą o obfitym lub bardzo obfitym wysięku, niezainfekowane, jak i z objawami infekcji:

- rany przewlekłe,
- odleżyny,
- owrzodzenia podudzi,
- owrzodzenia stopy cukrzycowej.

Działanie

Działanie wyrobu związane jest z antybakteryjnymi właściwościami, obecnej w opatrunku, jodyny. Stosowanie Iodosorb Dressing pozwala na utrzymanie rany w wilgotnym środowisku, a także zmniejszenie ryzyka rozwinięcia infekcji.

Skład

Kadeksomer, 0,9% jod.

Ostrzeżenia

- Przed zastosowaniem należy zapoznać się z treścią instrukcji użycia lub etykietą.
- Nie stosować w przypadku chorowania na zapalenie tarczycy Hashimoto, chorobę Gravesa-Basedowa bądź nietoksyczne wole guzkowe.



APTEKA "POD GWIAZDĄ I" SP. Z O.O.
Ul. Azalii Pontyjskiej 2A, Nowa Sarzyna
+48 500 623 943

- Nie stosować w przypadku uczulenia na którykolwiek ze składników wyrobu. W razie wystąpienia niepokojących objawów lub działań niepożądanych należy przerwać stosowanie wyrobu i skontaktować się z lekarzem.
- Nie stosować, jeśli opakowanie było wcześniej otwierane lub uszkodzone.
- Chronić przed działaniem promieni słonecznych. Przechowywać w temperaturze pokojowej. Chronić od światła i wilgoci.
- Nie używać ponownie.
- Przechowywać w sposób niedostępny dla dzieci.

Producent

SMITH NEPHEW

Aleje Jerozolimskie 124

Warszawa