

Opokan Med, plastry rozgrzewające, 10 sztuk

Cena: 48,52 zł



Opis słownikowy

Dla kogo	Dla kobiet, Dla mężczyzn
Marka	OPOKAN
Opakowanie	10 sztuk
Postać	Plastry
Producent	AFLOFARM FARMACJA POLSKA SP. Z O.O.
Przeznaczenie	Rozgrzewające
Rodzaj produktu	Wyrób medyczny
Wiek	Dla dorosłych, Dla seniorów

Opis produktu

Opis

Opokan Med to medyczne plastry rozgrzewające, które zawierają sproszkowane żelazo oraz węgiel drzewny. Zapewniają ciepło, które przynosi ulgę napiętym i obolałym mięśniom, wzmagając miejscowe krążenie krwi i łagodząc ból. Plastry te rozluźniają mięśnie, przynoszą ulgę w bólu i redukują stan zapalny, a uczucie ciepła i ulgi jest natychmiastowe. Produkt dostępny jest w opakowaniach po 10 sztuk.

Wskazania

Opokan Med plastry rozgrzewające skutecznie rozluźniają i przynoszą ulgę:

- w bólach mięśni (pleców, ramion, szyi),
- nerwobólach,
- bólach reumatycznych i stawowych,
- redukuje stan zapalny.

Działanie

Wyrób medyczny Opokan Med w formie plastrów rozgrzewających przykleja się bezpośrednio na skórę, w miejscu bólu mięśniowego. U osób starszych lub w przypadku niskiej tolerancji termicznej - na odzież bezpośrednio przylegającą do ciała. Odczucie ciepła i ulgi jest natychmiastowe. Plaster zapewnia ciepło, które przynosi odprężenie napiętym, obolałym mięśniom, wzmagając miejscowe krążenie krwi i łagodząc ból. Plaster działa bezpośrednio w miejscu bólu. Plaster można stosować sam lub w połączeniu z doustnymi lekami przeciwbólowymi.

Skład

Sproszkowane żelazo, woda, sól sodowa, węgiel drzewny

Sposób użycia

- Należy upewnić się, że skóra jest czysta, sucha i odtłuszczona.
- Bezpośrednio przed użyciem ostrożnie rozerwać saszetkę z plasterem, wyjąć plaster.
- Zdjąć taśmę zabezpieczającą część klejącą plastra i niezwłocznie przykleić plaster w miejscu odczuwania bólu.
- Plaster rozgrzeje się stopniowo do przyjemnej, przynoszącej ulgę temperatury (ok. 50°C).
- Plaster mocno trzyma się w miejscu naklejenia.
- Plaster jest jednorazowy i przeznaczony jedynie do użytku zewnętrznego.
- Plaster można utrzymywać na skórze do 12 godzin.
- Podczas stosowania należy kontrolować stan skóry. W przypadku stwierdzenia podrażnienia, opuchnięcia, zaczerwienienia skóry, należy natychmiast zdjąć plaster.
- W przypadku odczuwania zbyt wysokiej temperatury należy przerwać stosowanie.
- Nie przykładąć dodatkowego ucisku lub opaski dociskającej plaster.
- U osób z niską tolerancją termiczną stosować plaster tylko na odzież bezpośrednio przylegającą do ciała.
- U osób starszych stosować plaster tylko na odzież bezpośrednio przylegającą do ciała.

Ostrzeżenia

- Nie stosować na skórę chorą, podrażnioną, popękaną, uszkodzoną, po urazie lub podczas kąpieli.
- Nie stosować również na skórę z wylewami podskórnymi lub obrzękami. Nie stosować na obszarach ciała z upośledzonym czuciem ciepła.
- Plaster natychmiast usunąć w przypadku stwierdzenia silnego ciepła w miejscu jego stosowania (w sytuacji, kiedy odczuwalna temperatura jest zbyt wysoka) lub gdy dojdzie do podrażnienia, zaczerwienienia, pieczenia lub opuchnięcia skóry.
- W przypadku gdy tolerancja termiczna skóry jest niska, plaster należy nakleić na bieliznę lub warstwę odzieży (dotyczy to szczególnie osób starszych).
- Nie stosować u osób, nie będących w stanie w pełni dostosować się do instrukcji użycia lub samodzielnie zdjąć plaster, szczególnie u dzieci i osób w podeszłym wieku.
- Plastra nie stosować u dzieci poniżej 12 roku życia.
- Nie stosować plastra, który jest uszkodzony mechanicznie.
- Po kontakcie zawartości uszkodzonego plastra z oczami lub skórą, natychmiast miejsce kontaktu przemyć wodą.
- Użytego plastra nie podgrzewać повторно w inny sposób (np. kuchenka mikrofalowa).
- Unikać bezpośredniego wystawiania plastra na słońce.
- Nie należy stosować plastra w miejscu infekcji, a także równocześnie z innymi produktami leczniczymi stosowanymi miejscowo na skórę (np. preparaty przeciwbólowe lub rozgrzewające itp.) ani z innymi środkami emitującymi ciepło.
- Nie należy stosować plastra w tym samym miejscu. W razie potrzeby jednak, kolejny plaster można nakleić w tym samym miejscu po upływie 24 godzin.
- Plastra nie stosować podczas snu.
- Nie stosować dodatkowego ucisku na plaster.
- Nie naklejać plastra na inny.
- W przypadku zapalenia stawów, ciąży, chorób skóry, cukrzycy, zaburzeń krążenia, chorób serca, przed zastosowaniem, należy skonsultować użycie plastra z lekarzem.
- Produkty rozgrzewające mogą powodować poparzenia. Ryzyko wystąpienia poparzeń wzrasta z wiekiem.
- Przechowywać z dala od światła, w temperaturze pokojowej, w suchym i niedostępnym dla małych dzieci miejscu.

Producent

MEDICA
Przemysłowa 4a
59-300 Lubin

Galeria

