

Optilets, lancety sterylne, jednorazowe, 100 sztuk

Cena: 21,25 zł



Opis słownikowy

Dla kogo	Dla kobiet, Dla mężczyzn
Opakowanie	100 sztuk
Postać	-
Producent	DIAGNOSIS S.A.
Rodzaj produktu	Wyrób medyczny
Wiek	Dla dorosłych, Dla młodzieży, Dla seniorów

Opis produktu

Opis

Sterylnie, jednorazowe lancety Optilets, przeznaczone do nakłuwacza Optilet mini, charakteryzują się wyjątkowo cienkim i ostrym ostrzem. Zapewniają one minimalnie bolesne nakłucie oraz umożliwiają łatwe pobranie próbki krwi.

Zastosowanie

Do użytku z nakłuwaczem Optilet Mini.

Sposób użycia

- Umyj ręce ciepłą wodą z mydłem i dobrze je osusz.
- Umieść lancet w nośniku nakłuwacza.
- Usuń nasadkę zabezpieczającą.
- Wybierz miejsce nakłucia.
- Wykonaj nakłucie.
- Wykonaj pomiar poziomu glukozy zgodnie z instrukcją, oczyść miejsce nakłucia.
- Załóż nasadkę zabezpieczającą i wyrzuć lancet do odpowiedniego pojemnika.

Ostrzeżenia

- Nie należy używać ich ponownie.
- Użycie tego samego lancetu przez osoby trzecie wiąże się z podwyższonym ryzykiem zakażenia mikrobiologicznego.

Ważne wskazówki

- Lancety są jednorazowego, osobistego użytku. Nie należy używać ich ponownie.
- Nie używać lancetu jeśli nasadka jest uszkodzona.
- Nie przechowywać lancetu w nakłuwaczu.



APTEKA "POD GWIAZDĄ I" SP. Z O.O.
Ul. Azalii Pontyjskiej 2A, Nowa Sarzyna
+48 500 623 943

Producent

Diagnosis S.A
ul.Gen.W. Andersa 38A
15-113 Białystok