

Optitherm, termofofor PCV z pokrowcem z polaru, 2 l, 1 sztuka

Cena: 30,07 zł



Opis słownikowy

Dla kogo	Dla dziecka, Dla kobiet, Dla mężczyzn
Opakowanie	1 sztuka
Postać	Termofofor
Producent	SILESIA PHARMA SP. Z O.O.
Rodzaj produktu	Wyrób medyczny
Wiek	Dla dorosłych, Dla dziecka, Dla młodzieży, Dla seniorów

Opis produktu

Opis

Termofofor **OpiTherm** o pojemności 2 litrów to wielorazowy wyrób medyczny przeznaczony do ogrzewania ciała w celach leczniczych i profilaktycznych. Zapewnia ulgę, poprawia komfort oraz samopoczucie.

Zastosowanie

Do stosowania jako okład do miejscowego ogrzewania ciała, łagodzenia różnego rodzaju dolegliwości bólowych i rozluźnienie napiętych mięśni.

Sposób użycia

- Termofofor napełnij wodą o temperaturze ok 50°C do 2/3 objętości.
- Napełniając termofofor wodą, należy trzymać go w pozycji pionowej, trzymając za otwór wlewu (można stosować lejek).
- Stosowanie wody o temperaturze powyżej 70°C będzie skracało żywotność wyrobu i zwiększa ryzyko uszkodzenia termofoforu w czasie jego użytkowania, co może spowodować oparzenie użytkownika.
- Po napełnieniu wodą usuń nadmiar powietrza z termofoforu, przechylając go delikatnie aż do momentu gdy pojawi się woda przy otworze wlewu.
- Następnie mocno zakręć wlew korkiem. Sprawdź jego szczelność poprzez odwrócenie termofoforu korkiem do dołu i obserwację przez chwilę czy nie pojawia się woda.
- Termofofor jest gotowy do użycia. Po użyciu odkręć korek, wylej wodę i pozostaw w pozycji pionowej (otworem wlewowym do dołu) do całkowitego wyschnięcia.
- Czyszczenie: Termofofor można myć wodą z mydłem. Nie używaj środków dezynfekujących rozpuszczalników organicznych, kwasów, zasad i innych agresywnych środków chemicznych. Pokrowiec pierz ręcznie.

Ostrzeżenia

- Kontroluj powierzchnię wyrobu pod kątem zużycia i ewentualnych uszkodzeń, tj. pęknięć, perforacji, deformacji, odkształceń.
- Sprawdź szczelność przed każdym użyciem. Nie używaj wrzącej wody – gorący termofofor może spowodować oparzenia.



- Nie używaj wyrobu wykazującego cechy zużycia, zestarzenia się lub posiadającego wady.
- Nie obciążaj nadmiernie termoformu np. poprzez ściskanie termoformu, siadanie na nim – grozi to pęknięciem termoformu.
- Unikaj bezpośredniego, przedłużonego kontaktu ze skórą – używaj w pokrowcu.
- Nie wkładaj wyrobu do kuchenki mikrofalowej.
- Nie przepełniaj termoformu wodą.
- Nie wystawiaj na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
- Nie dopuszczaj do kontaktu termoformu ze smarami i olejami, a także z gorącymi powierzchniami.
- Nie stosuj u noworodków, niemowląt, u osób nieprzytomnych, niedołącznych oraz osób z zaburzeniami poznawczymi.
- Produkt nie jest odpowiedni dla dzieci poniżej 3 roku życia. Stosuj u dzieci tylko pod kontrolą osoby dorosłej.
- Nie wyrzucaj instrukcji używania.
- Nie używaj wyrobu po dacie ważności wskazanej na etykiecie.

Ważne wskazówki

- Przechowuj w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Przechowuj termoform suchy i otwarty (bez zakręcania korka) w suchym i ciemnym miejscu.

Producent

MIMIC Poland Spółka z o.o.
ul. Gimnazjalna 2A
85-007 Bydgoszcz