


# OST Tendon 40 mg/2 ml, roztwór do iniekcji, 2 ml x 1 ampułkostrzykawka

Cena: 422,96 zł

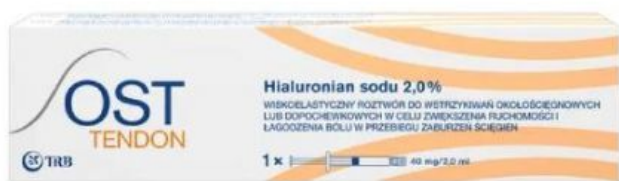

## Opis słownikowy

|                 |                                               |
|-----------------|-----------------------------------------------|
| Dla kogo        | Dla kobiet, Dla mężczyzn                      |
| Marka           | OST                                           |
| Opakowanie      | 1 ampułkostrzykawka                           |
| Postać          | Roztwór                                       |
| Producent       | TRB CHEMEDICA POLAND SP. Z O.O.               |
| Przeznaczenie   | Nawilżające, Wzmacniające, Wzmocnienie stawów |
| Rodzaj produktu | Wyrób medyczny                                |
| Wiek            | Dla dorosłych, Dla seniorów                   |

## Opis produktu

### Opis

**OST Tendon** to roztwór wiskoelastyczny w postaci wyrobu medycznego przeznaczony do iniekcji okołoscięgowych oraz do pochewki ścięgna. Ampułka zawiera 2 ml roztworu z 40 mg hialuronianu sodowego.

Ścięgna to wytrzymałe i elastyczne struktury włókniste, które przenoszą siłę z mięśni na kości oraz zapewniają odporność na siły podczas skurczu mięśnia. Otoczone są przez różne struktury, takie jak pasma włókniste, pochewki maziowe, pochewki wokółścięgnowe oraz kaletki ścięgnowe. Przeciążenie lub niewłaściwe napięcie może prowadzić do zapalenia lub zmian degeneracyjnych ścięgna, co powoduje ból oraz utratę jego funkcji. Nawilżenie ścięgna może zmniejszyć ból, poprawić jego funkcję oraz zmniejszyć ryzyko powstawania zrostów.

### Składniki

1 ampułkostrzykawka o pojemności 2 ml zawiera:

- izotoniczny roztwór hialuronianu sodowego (40 mg/2 ml),
- chlorek sodu, wodorofosforan sodu, dwuwodorofosforan sodu, mannitol i wodę do iniekcji.

### Zastosowanie

Leczenie bólu oraz ograniczonej ruchomości w chorobach ścięgien.

### Sposób użycia

- Preparat OST Tendon może być podawany wyłącznie przez lekarza, który ustala indywidualny dla pacjenta czas trwania leczenia.
- Wyrób medyczny dostępny jest w formie ampułko-strzykawki jednorazowego użytku z roztworem gotowym do wstrzykiwań.

- Preparat należy wstrzyknąć wokół chorego ścięgna lub do pochewki chorego ścięgna raz w tygodniu do całkowitej ilości dwóch iniekcji.
- Możliwe jest jednoczesne leczenie kilku ścięgien.
- W razie potrzeby cykle leczenia można powtarzać.
- Zawartość i zewnętrzna powierzchnia ampułkostrzykawki OST Tendon jest jałowa tak długo, dopóki sterylne opakowanie pozostaje nieuszkodzone.
- Bezpośrednio przed wykonaniem wstrzyknięcia ampułkostrzykawkę należy wyjąć z jałowego opakowania, odkręcić osłonkę z końcówki Luer-Lok™ oraz zamocować odpowiednią igłę (np. 25 do 27G) i zabezpieczyć ją lekko obracając.
- Jeśli w strzykawce znajduje się pęcherzyk powietrza, należy go usunąć przed iniekcją.

#### Ostrzeżenia

- Przed użyciem zapoznaj się z treścią instrukcji używania i etykietą bądź skonsultuj się z lekarzem, gdyż ten wyrób medyczny może nie być odpowiedni dla Ciebie.
- Wyrób medyczny przeznaczony jest wyłącznie do użytku przez lekarza.
- OST Tendon nie powinien być stosowany u pacjentów ze stwierdzoną nadwrażliwością na którykolwiek ze składników.
- Nie stosować w razie uszkodzenia ampułkostrzykawki lub sterylnego opakowania.
- Niezużyty bezpośrednio po otwarciu roztwór należy wyrzucić.
- Podczas leczenia przy pomocy OST Tendon mogą wystąpić miejscowe objawy uboczne, w tym ból, uczucie ciepła, siniaki, zaczerwienienie oraz obrzęk.
- Nie zaleca się stosowania preparatu u kobiet w ciąży, karmiących piersią, jak i w przypadku urazów ostrych (brak jest danych nt. bezpieczeństwa stosowania).

#### Ważne wskazówki

Przechowywać w temperaturze pokojowej (2-25°C) w suchym miejscu niedostępnym dla dzieci.

#### Dodatkowe informacje

- Sterylizowany parą wodną.
- Do ampułkostrzykawki nie została dołączona igła; jej rozmiar należy dobrać indywidualnie do pacjenta.

#### Producent

TRB Chemedica AG,  
Otto-Lilienthal-Ring 26  
85622 Feldkirchen/Monachium, Niemcy