

# Otovent, zestaw do wyrównywania ciśnienia w przewodzie słuchowym

Cena: 84,73 zł



## Opis słownikowy

|                 |                                                         |
|-----------------|---------------------------------------------------------|
| Dla kogo        | Dla dziecka, Dla kobiet, Dla mężczyzn                   |
| Opakowanie      | 1 sztuka                                                |
| Producent       | AXPHARM SP. Z O.O.                                      |
| Rodzaj produktu | Wyrób medyczny, Akcesoria                               |
| Wiek            | Dla dorosłych, Dla dziecka, Dla młodzieży, Dla seniorów |

## Opis produktu

### Opis

**Zestaw Otovent** do wyrównywania ciśnienia w przewodzie słuchowym to wyrób medyczny służący do eliminacji ujemnego ciśnienia w uchu. Składa się z balonu oraz końcówki nosowej, przez którą balon jest nadmuchiwany.

### Zastosowanie

- Wyrównywanie ciśnienia w uchu środkowym poprzez otwarcie trąbki słuchowej (Eustachiusza).
- Leczenie wysiękowego zapalenia ucha środkowego
- Łagodzenie objawów związanych z ujemnym ciśnieniem panującym w uchu środkowym w przypadku dysfunkcji trąbek słuchowych.
- Wyrób medyczny odpowiedni dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia.

### Sposób użycia

- Podłącz balon do końcówki nosowej. Prawą ręką mocno dociśnij jej okrągłą część do prawego otworu nosowego.
- Zatkaj lewy przewód nosowy palcami lewej ręki, przyciskając skrzydełko nosa z lewej strony.
- Wciągnij głęboko powietrze i zamknij usta.
- Prawym otworem nosowym nadmuchaj balon do osiągnięcia przez niego rozmiaru wielkości grejfruta.
- Powtórz czynności dla lewego otworu nosowego.
- Leczenie jest skuteczne, jeżeli odczuwalny jest wzrost ciśnienia i/lub „kliknięcie” w uchu.
- Jeżeli wzrost ciśnienia ani „kliknięcie” nie nastąpią, głęboko wciągnij powietrze, zamknij usta i nadmuchaj balon prawym otworem nosowym z głową lekko przechyloną do przodu, a następnie w prawo.
- Analogicznie postępuj w przypadku lewego otworu nosowego.
- W chwili, gdy nadmuchasz balon, szczelnie dociśnij końcówkę nosową do otworu nosowego i przełknij ślinę. Powietrze z balonu będzie uchodzić wstecznie w kierunku nosa.

## Ostrzeżenia

- Przed użyciem zapoznaj się z treścią instrukcji używania i etykietą bądź skonsultuj się z lekarzem, gdyż ten wyrób medyczny może nie być odpowiedni dla Ciebie.
- Nie należy stosować wyrobu medycznego przy ostrym zapaleniu ucha środkowego lub infekcji górnych dróg oddechowych.
- Balony dołączone do zestawu zawierają lateks. Osoby z nadwrażliwością na lateks i produkty go zawierające przed użyciem zestawu do wyrównywania ciśnienia w uchu Otovent® powinny zasięgnąć porady lekarza.
- Należy zaprzestać stosowania produktu i zasięgnąć porady lekarza w przypadku wystąpienia jakichkolwiek objawów alergii (np. wysypki, swędzenia, trudności w oddychaniu, opuchlizny).
- Nigdy nie należy podczas leczenia zestawem Otovent® używać balonów przeznaczonych do zabawy. Należy używać wyłącznie balonów Otovent® z oznaczeniem CE.
- U pacjentów, u których często występuje krwawienia z nosa, nadmuchiwanie balonu może wywołać takie krwawienie. Jest to zazwyczaj zjawisko niegroźne.
- Przed użyciem zestawu do wyrównywania ciśnienia w uchu jego stosowanie powinny skonsultować z lekarzem osoby po zabiegu operacyjnym w obrębie zatok.

## Ważne wskazówki

- Wyrób medyczny należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Leczenie dzieci powinno być zawsze nadzorowane przez osobę dorosłą.
- Każdy balon może zostać napełniony maksymalnie 20 razy (tylko wówczas ciśnienie potrzebne do przedmuchiwania trąbek słuchowych jest skuteczne).
- U niektórych osób podczas nadmuchiwania balonu przez nos może wystąpić uczucie dyskomfortu w uchu. Jest to uczucie, które podczas kolejnego nadmuchiwania balonu zmniejsza się i jest oznaką, że procedura wykonywana jest prawidłowo.

## Producent

Circius Phrama AB  
Södra Långebergsgatan 34-36  
SE-43632 Askim, Szwecja