

P.Teresa pas poporodowy biały L 1 szt.



Cena: 85,77 zł

Opis słownikowy

Opakowanie	1 szt.
Postać	-
Producent	SIGVARIS S.A.

Opis produktu

Opis

Pas brzuszny, poporodowy PT 0104 Pani Teresa to wyrób medyczny wielokrotnego użytku opracowany dla kobiet po porodzie w celu wsparcia regeneracji nadmiernie rozciągniętych podczas ciąży powłok brzusznych. Ma przewiewną strukturę i 24 cm szerokości. Zakłada się go przez nogi. Aby prawidłowo dopasować rozmiar, należy zmierzyć obwód brzucha.

Pas może być stosowany zarówno po porodzie fizjologicznym, jak i po cesarskim cięciu. Stosowany po porodzie operacyjnym dodatkowo zmniejsza ryzyko wystąpienia przepukliny pooperacyjnej oraz ryzyko rozejścia kresy białej, ochrania ranę pooperacyjną i łagodzi bóle z nią związane. Pomaga młodej mamie uzyskać poczucie komfortu i bezpieczeństwa. Pas umożliwia również wczesne wykonywanie ćwiczeń gimnastycznych, prowadzących do wzmocnienia mięśni brzucha (regularne noszenie pasa i wykonywanie odpowiednich ćwiczeń gimnastycznych skraca czas uzyskania sylwetki sprzed ciąży).

Zastosowanie

Po porodzie fizjologicznym i operacyjnym w celu wsparcia regeneracji rozciągniętych podczas ciąży powłok brzucha.

Po cesarskim cięciu w celu zmniejszenia ryzyka wystąpienia przepukliny pooperacyjnej i ryzyka rozejścia kresy białej, do ochrony rany pooperacyjnej i złagodzenia dolegliwości bólowych.

Sposób użycia

Pas wciągnąć przez nogi na wysokość brzucha i talii.

Ważne wskazówki

Właściwe użytkowanie urządzenia może wymagać porady lekarza. Wybór odpowiedniego rozmiaru jest warunkiem prawidłowego działania produktu. Aby dobrać odpowiedni rozmiar, zmierz obwód nadgarstka. Przechowywać w suchym miejscu. Unikać bezpośredniego światła słonecznego i wysokich temperatur. Unikaj silnego zabrudzenia. Prać ręcznie w 40°C z łagodnym środkiem piorącym (np. do prania wełny). Nie chlorować. Nie prasować.

Dodatkowe informacje

Rozmiar L



APTEKA "POD GWIAZDĄ I" SP. Z O.O.
Ul. Azalii Pontyjskiej 2A, Nowa Sarzyna
+48 500 623 943