

Pani Teresa Basis, temblak kończyny górnej, rozmiar XS, 1 sztuka



Cena: 15,44 zł

Opis słownikowy

Dla kogo	Dla kobiet, Dla mężczyzn
Opakowanie	1 sztuka
Postać	Temblak
Producent	SIGVARIS S.A.
Przeznaczenie	Stłuczenie, Złamanie, Zwichnięcie
Rodzaj produktu	Wyrób medyczny
Wiek	Dla dorosłych, Dla seniorów

Opis produktu

Opis

Temblak wspierający kończynę górną marki **Pani Teresa** to wyrób medyczny przeznaczony do stabilizacji w przypadku urazów, złamań i zwichnięć. Może służyć jako wsparcie dla opatrunku gipsowego, być używany podczas rehabilitacji po jego usunięciu, a także zapewniać tymczasowe unieruchomienie w sytuacji kontuzji przedramienia lub stawu łokciowego. Rozmiar XS odpowiedni jest dla osób o obwodzie klatki piersiowej poniżej 60 cm.

Skład

Poliester 85% polipropylen 8% bawełna 4% poliamid 3%.

Sposób użycia

- Dopasowanie rozmiaru: W celu prawidłowego dopasowania rozmiaru należy dokonać pomiaru obwodu klatki piersiowej, a następnie wybrać rozmiar z tabeli na opakowaniu.
- Sposób zakładania: Przedramię umieścić w kieszeni temblaka, kciuk zawiesić w przeznaczonym do tego „oczku” w wewnętrznej części temblaka. Taśmę przełożyć przez zdrowe ramię dopasowując odpowiednio jej długość za pomocą rzepów, a wzmocnienie ochronne na taśmie układając na szyi.
- Przechowywanie: W oryginalnym opakowaniu, w suchym i zacienionym miejscu.
- Przepis prania: Prać ręcznie w wodzie o temp. 40°C przy użyciu delikatnych środków piorących np. przeznaczonych do prania wełny. Nie dopuszczać do silnego zabrudzenia. Nie prasować! Nie chlorować!

Przeciwwskazania

Wyrób należy stosować tylko na nienaruszoną skórę. Nie stosować bezpośrednio na rany, uszkodzoną lub chorobowo zmienioną skórę. Stosowanie maści, olejków, kremów i podobnych substancji może mieć negatywny wpływ na właściwości wyrobu, obniżyć jego trwałość i zmniejszyć skuteczność działania. W przypadku utrzymujących się lub nasilających dolegliwości bólowych, wystąpienia reakcji uczuleniowej, podrażnienia skóry lub jakichkolwiek innych działań niepożądanych, związanych z użytkowaniem wyrobu, należy



APTEKA "POD GWIAZDĄ I" SP. Z O.O.
Ul. Azalii Pontyjskiej 2A, Nowa Sarzyna
+48 500 623 943

przerwać stosowanie i skonsultować się z lekarzem. Właściwe użycie wyrobu może wymagać porady specjalistycznego personelu medycznego. Ze względów higienicznych oraz w trosce o skuteczność działania wyrób przeznaczony jest do stosowania wyłącznie przez jednego pacjenta. Dobranie odpowiedniego rozmiaru jest warunkiem właściwego funkcjonowania wyrobu. Każde użycie wyrobu powinno być poprzedzone sprawdzeniem pod kątem oznak zużycia lub starzenia. Jedynie nieuszkodzony wyrób daje gwarancję optymalnego działania. Nie należy stosować wyrobu nieprzerwanie przez 24 godziny, chyba, że lekarz zalecił inaczej

Producent

SIGVARIS SA
Powidzka 50
00-052 Warszawa