

Pani Teresa Opaska elastyczna stawu nadgarstkowego, rozmiar M



Cena: 28,67 zł

Opis słownikowy

Dla kogo	Dla kobiet, Dla mężczyzn
Marka	PANI TERESA
Opakowanie	1 sztuka
Postać	opaska
Producent	SIGVARIS S.A.
Przeznaczenie	Przeciwbólowe, Przeciwoobrzękowe, Stabilizujące
Rodzaj produktu	Wyrób medyczny
Wiek	Dla dorosłych, Dla seniorów

Opis produktu

Opis

Opaska elastyczna na nadgarstek „20” Pani Teresa to wyrób medyczny odpowiedni do wielokrotnego użycia przeznaczony do wspomagania procesu leczenia oraz rehabilitacji. Może być stosowana profilaktycznie, jak również po urazie i operacji, oraz w przypadku przewlekłych zmian zwyrodnieniowych stawu nadgarstkowego. Pomaga w łagodzeniu dolegliwości bólowych, przekrwienia i upośledzenia funkcji ręki, zapobiega i zwalcza pourazowe obrzęki nadgarstka. Stosowana jako opatrunek po zdjęciu gipsu - wykazuje działanie przeciwbólowe, w szczególności w okresie rehabilitacji. Opaska jest wysoce elastyczna. Wykonana została z delikatnych dla skóry materiałów z dodatkiem bawełny. Aby wybrać właściwy rozmiar, należy zmierzyć obwód ręki w nadgarstku.

Stosowanie

- Opaskę wciągnąć na wysokość stawu nadgarstkowego, umieszczając kciuk w mniejszym otworze.
- Założyć szwami na zewnątrz.
- Stosować wyłącznie na nieuszkodzoną skórę.

Zastosowanie

- Po urazie,
- Po operacji,
- W przypadku przewlekłych zmianach zwyrodnieniowych,
- W celu złagodzenia bólu.

Ważne wskazówki

Właściwe użytkowanie urządzenia może wymagać porady lekarza. Wybór odpowiedniego rozmiaru jest warunkiem prawidłowego



APTEKA "POD GWIAZDĄ I" SP. Z O.O.
Ul. Azalii Pontyjskiej 2A, Nowa Sarzyna
+48 500 623 943

działania produktu. Aby dobrać odpowiedni rozmiar, zmierz obwód nadgarstka. Przechowywać w suchym miejscu. Unikać bezpośredniego światła słonecznego i wysokich temperatur. Unikaj silnego zabrudzenia. Prać ręcznie w 40°C z łagodnym środkiem piorącym (np. do prania wełny). Nie chlorować. Nie prasować.

Dodatkowe informacje

Rozmiar M

Producent

PANI TERESA
Powidzka 50
Września