

Pani Teresa Opaska elastyczna stawu skokowego, rozmiar M (z taśmą), 1 sztuka



Cena: 25,83 zł

Opis słownikowy

Dla kogo	Dla kobiet, Dla mężczyzn
Marka	PANI TERESA
Opakowanie	1 sztuka
Postać	opaska
Producent	SIGVARIS S.A.
Przeznaczenie	Przeciwbólowe, Przeciwoobrzękowe, Stabilizujące
Rodzaj produktu	Wyrób medyczny
Wiek	Dla dorosłych, Dla młodzieży, Dla seniorów

Opis produktu

Opis

PANI TERESA elastyczna opaska stawu skokowego - taśma Rozmiar M, obwód nogi nad kostką: 23 - 25 cm.

Wskazania

- Wzmacnia aparat więzadłowy stawu skokowego;
- Łagodzi ból i obrzęki;
- Zabezpiecza po urazach;
- Chroni przed częstymi skręceniami stawu;
- W przypadkach schorzeń reumatyczno-zwyrodnieniowych;
- Jako opatrunek po zdjęciu gipsu.

Sposób użycia

Dopasowanie rozmiaru:

- W celu prawidłowego dopasowania rozmiaru należy dokonać pomiaru obwodu nogi nad kostką, a następnie wybrać rozmiar z tabeli na opakowaniu.

Sposób zakładania:

- Opaskę nałożyć na staw skokowy krzyżując taśmę na przegubie. Nie stosować bezpośrednio na rany lub uszkodzoną skórę.

Ostrzeżenia



Wyrób należy stosować tylko na nienaruszoną skórę. Nie stosować bezpośrednio na rany, uszkodzoną lub chorobowo zmienioną skórę. Stosowanie maści, olejków, kremów i podobnych substancji może mieć negatywny wpływ na właściwości wyrobu, obniżyć jego trwałość i zmniejszyć skuteczność działania. W przypadku utrzymujących się lub nasilających dolegliwości bólowych, wystąpienia reakcji uczuleniowej, podrażnienia skóry lub jakichkolwiek innych działań niepożądanych, związanych z użytkowaniem wyrobu, należy przerwać stosowanie i skonsultować się z lekarzem. Właściwe użycie wyrobu może wymagać porady specjalistycznego personelu medycznego. Ze względów higienicznych oraz w trosce o skuteczność działania wyrób przeznaczony jest do stosowania wyłącznie przez jednego pacjenta. Dobranie odpowiedniego rozmiaru jest warunkiem właściwego funkcjonowania wyrobu. Każde użycie wyrobu powinno być poprzedzone sprawdzeniem pod kątem oznak zużycia lub starzenia. Jedynie nieuszkodzony wyrób daje gwarancję optymalnego działania. Nie należy stosować wyrobu nieprzerwanie przez 24 godziny, chyba, że lekarz zalecił inaczej.

Uwagi

- Stosowanie opaski należy skonsultować z lekarzem. W czasie noszenia opaski zalecane jest wykonywanie podstawowego zestawu ćwiczeń rehabilitacyjnych. Ciągłe stosowanie opaski bez wykonywania ćwiczeń może doprowadzić do osłabienia mięśni.
- Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, w suchym i zacienionym miejscu.
- Prać ręcznie w temperaturze 40°C przy użyciu delikatnych środków piorących np. przeznaczonych do prania wełny. Nie dopuszczać do silnego zabrudzenia! Nie prasować! Nie chlorować!

Producent

SIGVARIS SA
Powidzka 50
00-052 Warszawa
dorota.wisniewska@sigvaris.com