

Pani Teresa, opaska elastyczna stawu skokowego, rozmiar S (z taśmą), 1 sztuka

Cena: 25,83 zł



Opis słownikowy

Dla kogo	Dla kobiet, Dla mężczyzn
Marka	PANI TERESA
Opakowanie	1 sztuka
Postać	opaska
Producent	SIGVARIS S.A.
Przeznaczenie	Stabilizujące, Wspomagające
Rodzaj produktu	Wyrób medyczny
Wiek	Dla dorosłych, Dla seniorów

Opis produktu

Opis

Elastyczna opaska stawu skokowego marki **Pani Teresa** to wyrób medyczny zalecany do wspomagania leczenia i rehabilitacji zgodnie z zaleceniami lekarza lub fizjoterapeuty. Produkt jest łatwy w użyciu, dopasowuje się do kształtu stopy i można go nosić razem z obuwem.

Wskazania

Produkt wskazany do stosowania profilaktycznie i pourazowo. Pomaga łagodzić ból i zmniejszać obrzęki, które są wynikiem kontuzji. Wzmacnia aparat więzadłowy stawu skokowego chroniąc go przed częstymi skręceniami stawu. Wyrób doskonale zabezpiecza staw po urazach. Może być stosowany w przypadku schorzeń reumatyczno-zwyrodnieniowych, a także jako opatrunek po zdjęciu gipsu.

Skład

Poliamid 47%, Poliester 34%, Latex 19%.

Sposób użycia

Dopasowanie rozmiaru:

- W celu prawidłowego dopasowania rozmiaru należy dokonać pomiaru obwodu nogi nad kostką, a następnie wybrać rozmiar z tabeli na opakowaniu.

Sposób zakładania:

- Opaskę nałożyć na staw skokowy krzyżując taśmę na przegubie. Nie stosować bezpośrednio na rany lub uszkodzoną skórę.

Ostrzeżenia



Wyrób należy stosować tylko na nienaruszoną skórę. Nie stosować bezpośrednio na rany, uszkodzoną lub chorobowo zmienioną skórę. Stosowanie maści, olejków, kremów i podobnych substancji może mieć negatywny wpływ na właściwości wyrobu, obniżyć jego trwałość i zmniejszyć skuteczność działania. W przypadku utrzymujących się lub nasilających dolegliwości bólowych, wystąpienia reakcji uczuleniowej, podrażnienia skóry lub jakichkolwiek innych działań niepożądanych, związanych z użytkowaniem wyrobu, należy przerwać stosowanie i skonsultować się z lekarzem. Właściwe użycie wyrobu może wymagać porady specjalistycznego personelu medycznego. Ze względów higienicznych oraz w trosce o skuteczność działania wyrób przeznaczony jest do stosowania wyłącznie przez jednego pacjenta. Dobranie odpowiedniego rozmiaru jest warunkiem właściwego funkcjonowania wyrobu. Każde użycie wyrobu powinno być poprzedzone sprawdzeniem pod kątem oznak zużycia lub starzenia. Jedynie nieuszkodzony wyrób daje gwarancję optymalnego działania. Nie należy stosować wyrobu nieprzerwanie przez 24 godziny, chyba, że lekarz zalecił inaczej.

Uwagi

Stosowanie opaski należy skonsultować z lekarzem. W czasie noszenia opaski zalecane jest wykonywanie podstawowego zestawu ćwiczeń rehabilitacyjnych. Ciągłe stosowanie opaski bez wykonywania ćwiczeń może doprowadzić do osłabienia mięśni.

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, w suchym i zacienionym miejscu.

Prać ręcznie w temperaturze 40°C przy użyciu delikatnych środków piorących np. przeznaczonych do prania wełny. Nie dopuszczać do silnego zabrudzenia! Nie prasować! Nie chlorować!

Producent

SIGVARIS SA

Powidzka 50

00-052 Warszawa

dorota.wisniewska@sigvaris.com