

# Pani Teresa, pas brzuszny uniwersalny otwierany, szerokość 30 cm, rozmiar S



Cena: 84,85 zł

## Opis słownikowy

|                 |                             |
|-----------------|-----------------------------|
| Dla kogo        | Dla kobiet, Dla mężczyzn    |
| Marka           | PANI TERESA                 |
| Opakowanie      | 1 sztuka                    |
| Producent       | SIGVARIS S.A.               |
| Przeznaczenie   | Wspomagające, Wzmacniające  |
| Rodzaj produktu | Wyrób medyczny              |
| Wiek            | Dla dorosłych, Dla seniorów |

## Opis produktu

### Opis

Poporodowy pas brzuszny Pani Teresa ma przewiewną strukturę i 24 cm szerokości. Zakłada się go przez nogi. To wyrób medyczny wielokrotnego użytku opracowany dla kobiet po porodzie.

Stosowany po porodzie fizjologicznym i operacyjnym (cesarskim cięciu) pomaga w regeneracji nadmiernie rozciągniętych w okresie ciąży powłok brzusznych. Używany po cesarskim cięciu zmniejsza ryzyko rozejścia kresy białej i wystąpienia przepukliny pooperacyjnej, oraz ochrania ranę pooperacyjną i łagodzi ból z nią związany. Pomaga także młodej mamie odzyskać poczucie pewności i bezpieczeństwa.

Pas umożliwia również wczesne wykonywanie ćwiczeń gimnastycznych, prowadzących do wzmocnienia mięśni brzucha (systematyczne noszenie pasa i wykonywanie odpowiednich ćwiczeń gimnastycznych skraca czas powrotu do sylwetki sprzed ciąży). Aby prawidłowo dopasować rozmiar, należy zmierzyć obwód brzucha.

### Skład

Poliester 55%, bawełna 30% elastan 8%, poliuretan 4%, poliamid 3%.

### Zastosowanie

- Po porodzie fizjologicznym i operacyjnym w celu wsparcia regeneracji rozciągniętych w okresie ciąży powłok brzucha.
- Po cesarskim cięciu w celu zmniejszenia ryzyka wystąpienia przepukliny pooperacyjnej i ryzyka rozejścia kresy białej, do ochrony rany pooperacyjnej i złagodzenia dolegliwości bólowych.

### Sposób użycia

Dopasowanie rozmiaru:

- W celu prawidłowego dopasowania rozmiaru należy dokonać pomiaru obwodu brzucha, a następnie wybrać rozmiar z tabeli na opakowaniu.



#### Sposób zakładania:

- Odpiąć rzep. Pas ułożyć obejmując brzuch i odcinek lędźwiowo – krzyżowy, tak by zapięcie na rzep przypadało z przodu. Pas zapiąć regulując indywidualnie w obrębie zapięcia.
- Uwaga! Nie stosować bezpośrednio na rany lub uszkodzoną skórę.

#### Ważne wskazówki

Właściwe użytkowanie urządzenia może wymagać porady lekarza. Wybór odpowiedniego rozmiaru jest warunkiem prawidłowego działania produktu. Aby dobrać odpowiedni rozmiar, zmierz obwód nadgarstka. Przechowywać w suchym miejscu. Unikać bezpośredniego światła słonecznego i wysokich temperatur. Unikaj silnego zabrudzenia. Prać ręcznie w 40°C z łagodnym środkiem piorącym (np. do prania wełny). Nie chlorować. Nie prasować.

#### Dodatkowe informacje

Rozmiar S

#### Producent

PANI TERESA  
Powidzka 50  
Września