

Pani Teresa, Uniwersalny pas brzuszny otwarty "30", rozmiar XXXL



Cena: 123,09 zł

Opis słownikowy

Dla kogo	Dla kobiet, Dla mężczyzn
Marka	PANI TERESA
Opakowanie	1 sztuka
Postać	Pas
Producent	SIGVARIS S.A.
Przeznaczenie	Ochronne, Stabilizujące, Wspierające
Rodzaj produktu	Wyrób medyczny
Wiek	Dla dorosłych

Opis produktu

Opis

Uniwersalny pas brzuszny w rozmiarze XXXL (wysokość 30 cm, odpowiedni na obwód brzucha 138-150 cm) jest zalecany dla osób po zabiegach chirurgicznych w obrębie jamy brzusznej. Pas znacznie ułatwia poruszanie się i codzienne funkcjonowanie po operacji, zmniejsza ryzyko wystąpienia przepuklin pooperacyjnych oraz poprawia komfort psychiczny użytkownika. Produkt jest zapinany na rzep.

Działanie

- Po operacjach jamy brzusznej – pas ułatwia poruszanie się
- Zmniejsza ryzyko wystąpienia przepukliny pooperacyjnej
- Ogranicza powiększanie się istniejących przepuklin brzusznych, np. pępkowych, pooperacyjnych
- Wspomaga leczenie w przypadku rwy kulszowej
- W przebiegu chorób zwyrodnieniowo-zapalnych stawów pas ma działanie ochraniające i łagodzi bóle
- Wzmacnia mięśnie brzucha i zapobiega opuszczaniu trzewi jamy brzusznej
- Ma działanie ocieplające

Sposób użycia

Odpiąć rzep. Pas ułożyć obejmując brzuch i odcinek lędźwiowo – krzyżowy, tak by zapięcie na rzep przypadło z przodu. Pas zapiąć regulując indywidualnie w obrębie zapięcia.

Przeciwwskazania

Nie stosować wyrobu na rany, chorobowo zmienioną lub uszkodzoną skórę.

Ostrzeżenia



APTEKA "POD GWIAZDĄ I" SP. Z O.O.
Ul. Azalii Pontyjskiej 2A, Nowa Sarzyna
+48 500 623 943

- Stosowanie wyrobu skonsultować z lekarzem.
- Nie jest wskazane stosowanie wyrobu przez całą dobę.
- Brak codziennej higieny osobistej lub niewłaściwa konserwacja wyrobu mogą spowodować otarcia naskórka, powstawanie odczynów alergicznych związanych ze wzmożoną potliwością i rozwojem flory bakteryjnej.
- W razie wystąpienia ostrego bólu lub podrażnienia skóry podczas noszenia wyrobu, wyrób natychmiast zdjąć i skonsultować się z lekarzem.

Producent

SIGVARIS S.A.
ul. Mazowiecka 11/49
00-052 Warszawa