

Pani Teresa Uniwersalny pas brzuszny, otwierany, szerokość 30 cm, rozmiar XXL



Cena: 84,85 zł

Opis słownikowy

Dla kogo	Dla kobiet, Dla mężczyzn
Marka	PANI TERESA
Opakowanie	1 sztuka
Postać	Pas
Producent	SIGVARIS S.A.
Przeznaczenie	Stabilizujące, Wspomagające
Rodzaj produktu	Wyrób medyczny
Wiek	Dla dorosłych, Dla seniorów

Opis produktu

Opis
PANI TERESA uniwersalny pas brzuszny „30” Szerokość pasa: 30 cm. Rozmiar XXL - obwód brzucha: 121 - 140 cm.

Wskazania

- Po operacjach jamy brzusznej - pas ułatwia poruszanie się
- Zmniejsza ryzyko wystąpienia przepukliny pooperacyjnej
- Ogranicza powiększanie się istniejących przepuklin brzusznych, np. pępkowych, pooperacyjnych
- Pas wspomaga leczenie w przypadku rwy kulszowej
- W przebiegu chorób zwyrodnieniowo – zapalnych stawów pas ma działanie ochraniające i łagodzi bóle
- Pas wzmacnia mięśnie brzucha i zapobiega opuszczeniu trzewi jamy brzusznej
- Ma działanie ocieplające

Sposób użycia
Dopasowanie rozmiaru:

- W celu prawidłowego dopasowania rozmiaru należy dokonać pomiaru obwodu brzucha, a następnie wybrać rozmiar z tabeli na opakowaniu.

Sposób zakładania:

- Odpiąć rzep. Pas ułożyć obejmując brzuch i odcinek lędźwiowo – krzyżowy, tak by zapięcie na rzep przypadło z przodu. Pas zapiąć regulując indywidualnie w obrębie zapięcia.



Uwagi

- Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, suchym i zacienionym miejscu.
- Prać ręcznie w wodzie o temp. 40°C przy użyciu delikatnych środków piorących np. przeznaczonych do prania wełny. Nie dopuszczać do silnego zabrudzenia. Nie prasować! Nie chlorować!
- Stosowanie wyrobu skonsultować z lekarzem.
- W czasie noszenia pasa zalecane jest wykonywanie podstawowego zestawu ćwiczeń rehabilitacyjnych. Ciągłe stosowanie pasa bez wykonywania ćwiczeń może doprowadzić do osłabienia mięśni brzucha.

Producent

PANI TERESA
Powidzka 50
Września