

Pani Teresa, uniwersalny pas brzuszny, szerokość 30 cm, rozmiar L, 1 sztuka



Cena: 84,85 zł

Opis słownikowy

Dla kogo	Dla kobiet, Dla mężczyzn
Marka	PANI TERESA
Opakowanie	1 sztuka
Postać	-
Producent	SIGVARIS S.A.
Rodzaj produktu	Wyrób medyczny
Wiek	Dla dorosłych, Dla seniorów

Opis produktu

Opis

Pani Teresa uniwersalny pas brzuszny zapinany na rzep to wyrób medyczny odpowiedni do stosowania w celu wsparcia mięśni brzucha. Działa wzmacniająco na mięśnie brzucha i zapobiega opadnięciu trzewi jamy brzusznej. Stosowany po operacjach jamy brzusznej nie tylko ułatwia poruszanie się i podnoszenie, ale również redukuje ryzyko wystąpienia przepukliny pooperacyjnej. W przypadku istniejących już przepuklin brzusznych (np. pępkowych, pooperacyjnych), powstrzymuje ich powiększanie się. W chorobach zwyrodnieniowo-zapalnych stawów łagodzi ból i ochrania. Może być również stosowany wspomagająco w leczeniu rwy kulszowej. Pas ma 30 cm szerokości i zapinany jest na rzep. Wykonany jest z delikatnych dla skóry materiałów, zawiera dodatek bawełny. Dzięki regulowanemu zapięciu można go dokładnie dopasować do ciała. To produkt wielorazowego użytku.

Zastosowanie

Ułatwia wstawanie i poruszanie się po operacjach jamy brzusznej oraz zmniejsza ryzyko powstania przepukliny. Istniejąca wcześniej przepuklina brzuszna, taka jak pępowina po operacji, aby zapobiec powiększeniu. Wspomaga mięśnie brzucha i przeciwdziała na opuszczaniu się trzewi jamy brzusznej.

Sposób użycia

- Odepnij rzep i zawij pas dookoła talii, obejmując brzuch i odcinek lędźwiowo-krzyżowy. Zwróć uwagę, by zapięcie na rzep wypadło z przodu.
- Zapnij pas, regulując dopasowanie w obrębie zapięcia.

Ważne wskazówki

Właściwe użytkowanie urządzenia może wymagać porady lekarza. Wybór odpowiedniego rozmiaru jest warunkiem prawidłowego działania produktu. Aby dobrać odpowiedni rozmiar, zmierz obwód nadgarstka. Przechowywać w suchym miejscu. Unikać bezpośredniego światła słonecznego i wysokich temperatur. Unikaj silnego zabrudzenia. Prać ręcznie w 40°C z łagodnym środkiem piorącym (np. do prania wełny). Nie chlorować. Nie prasować.



APTEKA "POD GWIAZDĄ I" SP. Z O.O.
Ul. Azalii Pontyjskiej 2A, Nowa Sarzyna
+48 500 623 943

Dodatkowe informacje

Rozmiar L

Producent

PANI TERESA

Powidzka 50

Września