

Pani Teresa, uniwersalny pas brzuszny z zapięciem, rozmiar S, wysokość 22 cm, 1 sztuka



Cena: 81,97 zł

Opis słownikowy

Dla kogo	Dla kobiet, Dla mężczyzn
Marka	PANI TERESA
Opakowanie	1 sztuka
Postać	Pas
Producent	SIGVARIS S.A.
Przeznaczenie	Stabilizujące, Wspomagające
Rodzaj produktu	Wyrób medyczny
Wiek	Dla dorosłych, Dla seniorów

Opis produktu

Opis

Uniwersalny pas brzuszny marki **Pani Teresa** to medyczny wyrób wspomagający mięśnie brzucha podczas rekonwalescencji po operacjach jamy brzusznej. Produkt posiada regulowane zapięcie i wykonany jest z materiału z dodatkiem bawełny, co sprawia, że jest delikatny dla skóry.

Wskazania

Wyrób medyczny Uniwersalny pas brzuszny:

- może być stosowany po operacjach jamy brzusznej - ułatwia poruszanie się,
- zmniejsza ryzyko wystąpienia przepukliny pooperacyjnej,
- ogranicza powiększanie się istniejących przepuklin brzusznych, np. pępkowych, pooperacyjnych,
- wzmacnia mięśnie brzucha i zapobiega opuszczeniu trzewi jamy brzusznej.

Skład

Poliester 55%, Bawełna 30%, Elastan 8%, Poliuretan 4%, Poliamid 3%.

Sposób użycia

Dopasowanie rozmiaru:

- W celu prawidłowego dopasowania rozmiaru należy dokonać pomiaru obwodu brzucha, a następnie wybrać rozmiar z tabeli na opakowaniu.

Sposób zakładania:

- Odpiąć rzep. Pas ułożyć obejmując brzuch i odcinek lędźwiowo – krzyżowy, tak by zapięcie na rzep przypadło z przodu. Pas zapiąć regulując indywidualnie w obrębie zapięcia.

Ostrzeżenia

Wyrób należy stosować tylko na nienaruszoną skórę. Nie stosować bezpośrednio na rany, uszkodzoną lub chorobowo zmienioną skórę. Stosowanie maści, olejków, kremów i podobnych substancji może mieć negatywny wpływ na właściwości wyrobu, obniżyć jego trwałość i zmniejszyć skuteczność działania. W przypadku utrzymujących się lub nasilających dolegliwości bólowych, wystąpienia reakcji uczuleniowej, podrażnienia skóry lub jakichkolwiek innych działań niepożądanych, związanych z użytkowaniem wyrobu, należy przerwać stosowanie i skonsultować się z lekarzem. Właściwe użycie wyrobu może wymagać porady specjalistycznego personelu medycznego. Ze względów higienicznych oraz w trosce o skuteczność działania wyrób przeznaczony jest do stosowania wyłącznie przez jednego pacjenta. Dobranie odpowiedniego rozmiaru jest warunkiem właściwego funkcjonowania wyrobu. Każde użycie wyrobu powinno być poprzedzone sprawdzeniem pod kątem oznak zużycia lub starzenia. Jedynie nieuszkodzony wyrób daje gwarancję optymalnego działania. Nie należy stosować wyrobu nieprzerwanie przez 24 godziny, chyba, że lekarz zalecił inaczej

Uwagi

- Przed zastosowaniem należy zapoznać się z treścią instrukcji użycia.
- Stosowanie wyrobu skonsultować z lekarzem lub fizjoterapeutą.
- W czasie noszenia pasa zalecane jest wykonywanie podstawowego zestawu ćwiczeń rehabilitacyjnych. Ciągłe stosowanie pasa bez wykonywania ćwiczeń może doprowadzić do osłabienia mięśni brzucha.
- Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, suchym i zacienionym miejscu.
- Stosowanie równoległe z pasem maści, kremów, olejków bądź podobnych substancji może wpłynąć negatywnie na właściwości wyrobu.
- Prać ręcznie w wodzie o temp. 40°C przy użyciu delikatnych środków piorących np. przeznaczonych do prania wełny. Nie dopuszczać do silnego zabrudzenia. Nie prasować! Nie chlorować!
- Przechowywać w sposób niedostępny dla dzieci.

Producent

SIGVARIS SA
Powidzka 50
00-052 Warszawa
dorota.wisniewska@sigvaris.com