

Pantherin Ecto, żel do nosa nawilżająco- łagodzący z ektoiną, 15 ml

Cena: 29,93 zł



Opis słownikowy

Dla kogo	Dla dziecka, Dla kobiet, Dla mężczyzn
Opakowanie	15 ml
Postać	żel do nosa
Producent	SOLINEA SP. Z O.O.
Przeznaczenie	Łagodzące, Nawilżające
Rodzaj produktu	Wyrób medyczny
Wiek	Dla dorosłych, Dla dziecka, Dla młodzieży, Dla seniorów

Opis produktu

Opis

Pantherin Ecto to medyczny wyrób w postaci nawilżającego i kojącego żelu do nosa zawierającego ektoinę. Produkt dostępny jest w opakowaniu o pojemności 15 ml.

Wskazania

Żel Pantherin ecto można stosować w celu:

- regeneracji błony śluzowej nosa po zabiegach chirurgicznych,
- nawilżenia błony śluzowej nosa,
- łagodzenia podrażnień i stanów zapalnych błony śluzowej nosa,
- wspomagająco przy przewlekłym zanikowym nieżycie błon śluzowych nosa,
- ochrony błony śluzowej nosa przed niekorzystnymi czynnikami środowiska (zapylenie i zanieczyszczenie powietrza).

Działanie

- Żel do nosa Pantherin ecto dzięki zawartości składników czynnych wykazuje silne właściwości nawilżająco- łagodzące, a dodatkowo wspomaga regenerację błony śluzowej nosa.
- Ektoina wykazuje właściwości łagodzące stany zapalne i stabilizujące błony komórkowe.
- Zapobiega wysychaniu oraz utrzymuje prawidłowe nawilżenie, nie powodując uczucia lepkości błony śluzowej nosa.
- Żel stabilizuje błonę komórkową, zmniejszając ryzyko wystąpienia infekcji bakteryjnych i wirusowych jamy nosowej.
- Preparat łagodzi podrażnienia oraz przyczynia się do regeneracji błony śluzowej nosa.
- Zabezpiecza błonę śluzową nosa przed szkodliwym działaniem czynników zewnętrznych.

Skład



Woda oczyszczona, D-pantenol, Pseudoalteromonas Exopolysaccharides, ektoina, gliceryna, glikol propylenowy, karboksymetyloceluloza, chlorek benzalkoniowy.

Sposób użycia

- Pantherin ecto jest preparatem bezpiecznym, może być stosowany bez ograniczeń ilościowych, u dorosłych i dzieci, zgodnie z własnymi potrzebami.
- U większości osób uzyskuje się jednak wyraźną poprawę po zastosowaniu niewielkiej ilości żelu, 3-4 razy dziennie po 1 dawce do każdego otworu nosowego.
- Pantherin ecto może być stosowany przez dłuższy okres, jednak w przypadku braku poprawy po ok. 14 dniach, należy zasięgnąć porady lekarza.

Ostrzeżenia

- Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.
- Nie należy stosować żelu Pantherin ecto po upływie daty ważności.
- W przypadku wystąpienia objawów niepożądanych, należy zaprzestać stosowania preparatu i skonsultować się z lekarzem.
- Ze względów higienicznych oraz w celu zapobiegania rozprzestrzeniania się infekcji, jedno opakowanie należy przeznaczyć dla jednej osoby. Nie używać w przypadku uszkodzenia opakowania.
- Przechowywać w temperaturze pokojowej, w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Po operacjach i zabiegach chirurgicznych, przed zastosowaniem należy skonsultować się z lekarzem
- Stosować zgodnie z przeznaczeniem. Unikać kontaktu z oczami.
- Nie połykać.

Producent

Solinea Sp. z o.o. Sp. K.
Elizówka 65, Hala I
21-003 Ciecierzyn
biuro@solinea.pl