

Pas brzuszny uniwersalny 22 cm Pani Teresa



Cena: 81,97 zł

Opis słownikowy

Dla kogo	Dla kobiet, Dla mężczyzn
Opakowanie	1 sztuka
Postać	Pas
Producent	SIGVARIS S.A.
Przeznaczenie	Ochronne
Rodzaj produktu	Wyrób medyczny
Wiek	Dla dorosłych, Dla seniorów

Opis produktu

Opis

Pas brzuszny uniwersalny z zapięciem PT 102 • Rozmiar: XS

Wskazania

- Po operacjach jamy brzusznej
- Pas ułatwia podnoszenie się i poruszanie
- Zmniejsza ryzyko wystąpienia przepukliny pooperacyjnej
- Ogranicza powiększanie się istniejących przepuklin brzusznych, np. pępkowych, pooperacyjnych
- Od zewnątrz wspomaga mięśnie brzucha i zapobiega opuszczaniu trzewi jamy brzusznej

Skład

- Poliester 55%
- Bawełna 30%
- Elastan 8%
- Poliuretan 4%
- Poliamid 3%

Sposób użycia

Odpiąć rzepy. Założyć wyrób, obejmując brzuch i odcinek lędźwiowo-krzyżowy tak, aby zapięcie na rzep przypadało z przodu. Zapiąć rzepy.

Ostrzeżenia

- Stosowanie wyrobu skonsultować ze specjalistą (lekarz ginekolog, pielęgniarka położna, fizjoterapeuta). Uniwersalny pas brzuszny z zapięciem „22” Pani Teresa należy stosować tylko na nienaruszoną skórę.
- Nie stosować bezpośrednio na rany, uszkodzoną lub chorobowo zmienioną skórę.



- Stosowanie maści, olejków, kremów i podobnych substancji może mieć negatywny wpływ na właściwości wyrobu, obniżyć jego trwałość i zmniejszyć skuteczność działania.
- W przypadku utrzymujących się lub nasilających dolegliwości bólowych, wystąpienia reakcji uczuleniowej, podrażnienia skóry lub jakichkolwiek innych działań niepożądanych, związanych z użytkowaniem wyrobu, należy przerwać stosowanie i skonsultować się z lekarzem.
- Właściwe użycie pasa może wymagać porady specjalistycznego personelu medycznego.
- Ze względów higienicznych oraz w trosce o skuteczność działania wyrób przeznaczony jest do stosowania wyłącznie przez jednego pacjenta.
- Dobranie odpowiedniego rozmiaru jest warunkiem właściwego funkcjonowania wyrobu.

Producent
PANI TERESA