

Paski Abra, 50 sztuk



Cena: 39,27 zł

Opis słownikowy

| | |
|-----------------|--|
| Dla kogo | Dla diabetyków, Dla kobiet, Dla mężczyzn |
| Opakowanie | 50 sztuk |
| Postać | Test paskowy |
| Producent | DIAGNOSIS S.A. |
| Przeznaczenie | Diagnostyczne |
| Rodzaj produktu | Wyrób medyczny |
| Wiek | Dla dorosłych, Dla seniorów |

Opis produktu

Opis

Paski testowe **Abra** służą do samodzielnego pomiaru stężenia glukozy we krwi. W celu pomiaru, należy używać pasków testowych w połączeniu z glukometrem Abra. Paski testowe są przeznaczone do użycia zewnętrznego i służą do ilościowego pomiaru glukozy we krwi pobranej z opuszki palca, dłoni lub przedramienia.

Każdy pasek testowy ma obszar testowy zawierający reaktywne substancje chemiczne. Gdy na ten obszar aplikuje się próbkę krwi, zachodzi reakcja chemiczna, która powoduje wytworzenie prądu elektrycznego. Glukometr odczytuje ten prąd i na podstawie tego oblicza stężenie glukozy we krwi. Wynik pomiaru jest wyświetlany na ekranie glukometru. Paski testowe Abra mają zakres pomiarowy od 20 mg/dL (1.1 mmol/L) do 600 mg/dL (33.3 mmol/L).

Ważne jest, że paski testowe Abra są skalibrowane w taki sposób, aby wyświetlać wartość glukozy w osoczu, co ułatwia porównanie wyników z metodami laboratoryjnymi. System pomiaru poziomu glukozy we krwi Abra jest przeznaczony głównie dla użytkowników nieprofesjonalnych i powinien być używany przez jedną osobę.

Wskazania

Paski testowe Abra należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla małych dzieci. Ważne jest, aby trzymać je z dala od zasięgu dzieci, aby zapobiec przypadkowemu połknięciu lub nieodpowiedniemu użyciu.

Przechowuj paski testowe w suchym miejscu, z dala od wilgoci. Wilgoć może wpływać na skuteczność i jakość pasków testowych, dlatego ważne jest, aby zachować je w suchym środowisku, aby zapewnić ich odpowiednie działanie.

Nie używaj pasków testowych, jeśli opakowanie jest uszkodzone. Jeżeli zauważysz jakiegokolwiek uszkodzenia na opakowaniu pasków testowych Abra, nie powinieneś ich używać.

Zastosowanie

Do pomiaru glukozy we krwi.

Sposób użycia

Nanoszenie krwi na pasek testowy: przy pomocy nakłuwacza nakłuj bok opuszki palca. W celu lepszego uformowania się kropli krwi rozmasuj palec w kierunku jego opuszki lekko uciskając.



Ostrzeżenia

- Paski testowe należy zużyć w ciągu 3 miesięcy od pierwszego otwarcia pojemnika.
- Przechowywać w szczelnie zamkniętym, oryginalnym opakowaniu, w suchym pomieszczeniu.

Producent

Diagnosis S.A.
ul.Gen.W.Andersa 38A
15-113 Białystok.