

Paski Accu-Chek ACTIVE, 50 sztuk

Cena: 39,37 zł



Opis słownikowy

Dla kogo	Dla diabetyków, Dla kobiet, Dla mężczyzn
Opakowanie	50 pasków
Postać	Test paskowy
Producent	ROCHE DIAGNOSTICS GMBH
Rodzaj produktu	Wyrób medyczny
Wiek	Dla dorosłych, Dla seniorów

Opis produktu

Opis

Paski testowe stworzone do indywidualnego pomiaru poziomu glukozy we krwi przy wykorzystaniu urządzeń Accu-Chek Active.

Zastosowanie

Do pomiaru stężenia glukozy we krwi. Przydatne w samokontroli.

Sposób użycia

Nanoszenie krwi na pasek testowy:

- opcja: test paskowy w glukometrze: włóż pasek do glukometru. Przy pomocy nakłuwacza nakłuj bok opuszki palca. W celu lepszego uformowania się kropli krwi rozmasuj palec w kierunku jego opuszki lekko uciskając. Nanieś kroplę na środek pomarańczowego pola i odsuń palec od testu paskowego. Wynik pomiaru powinien wyświetlić się na ekranie glukometru po kilku sekundach.
- opcja: test paskowy poza glukometrem - przy pomocy nakłuwacza nakłuj bok opuszki palca. W celu lepszego uformowania się kropli krwi rozmasuj palec w kierunku jego opuszki lekko uciskając. Nanieś kroplę na środek pomarańczowego pola i odsuń palec od testu paskowego. Wsuń test paskowy w kierunku pokazanym przez strzałki do prowadnicy. Test musi wyczuwalnie "zaskoczyć" na swoje miejsce. Wynik pomiaru powinien wyświetlić się na ekranie glukometru po kilku sekundach.

Ważne wskazówki

Przechowywać w suchym miejscu, niedostępnym dla małych dzieci.

Producent

Roche Diabetes Care Polska Sp. z o.o.
Dział Diabetologii,
ul. Wybrzeże Gdyrńskie 6B,
01-531 Warszawa.



APTEKA "POD GWIAZDĄ I" SP. Z O.O.
Ul. Azalii Pontyjskiej 2A, Nowa Sarzyna
+48 500 623 943