

Paski Contour TS, 50 sztuk

Cena: 39,09 zł



Opis słownikowy

Dla kogo	Dla diabetyków, Dla kobiet, Dla mężczyzn
Opakowanie	50 pasków
Postać	Test paskowy
Producent	BAYER CONSUMER CARE AG
Przeznaczenie	Diagnostyczne
Rodzaj produktu	Wyrób medyczny
Wiek	Dla dorosłych, Dla seniorów

Opis produktu

Opis

Paski testowe **CONTOUR TS** przeznaczone są do indywidualnego pomiaru poziomu glukozy we krwi.

Sposób użycia

Wyjąć pasek testowy z butelki i szczelnie zamknąć wieczko. Paski testowe należy zawsze przechowywać w oryginalnej butelce. Należy sprawdzić datę ważności i zapisaną datę wyrzucenia. Upewnić się, czy paski testowe nie wyglądają na podarte lub uszkodzone. Przytrzymać pasek testowy skierowany szarym końcem do góry. Włożyć szary koniec paska do pomarańczowego portu w glukometrze. Nie ma potrzeby kodowania. Glukometr włączy się automatycznie. Na wyświetlaczu pojawi się symbol paska testowego z migającą kropłą krwi, co oznacza, że glukometr jest gotowy do badania. W momencie pojawienia się migającej kropli krwi należy dotknąć polem reakcyjnym paska testowego do kropli krwi. Unikać nadmiernego uciskania palca podczas formowania kropli krwi. Badanie wykonać natychmiast po uzyskaniu kropli krwi. Nie nakrapiać krwi bezpośrednio na płaską powierzchnię paska testowego. Pasek testowy jest tak wykonany, że sam łatwo zasysa krew końcówką paska. Nie należy przyciskać paska testowego do palca, gdyż może to blokować końcówkę paska.

Ostrzeżenia

- Przechowywać w temperaturze od 9 do 30 °C
- Chronić od światła i wilgoci.
- Przechowywać w sposób niedostępny dla dzieci.
- Tylko do użytku zewnętrznego.

Producent

BAYER CONSUMER CARE AG