

Pasocare Classic Plus, plaster tkaninowy z opatrunkiem, 1 m x 8 cm, 1 sztuka



Cena: 14,64 zł

Opis słownikowy

Dla kogo	Dla dziecka, Dla kobiet, Dla mężczyzn
Opakowanie	1 sztuka
Postać	plaster
Producent	PASO-TRADING SP. Z O.O.
Przeznaczenie	Otarcia, Rana
Rodzaj produktu	Wyrób medyczny
Wiek	Dla dorosłych, Dla dziecka, Dla młodzieży, Dla seniorów

Opis produktu

Opis

Plaster tkaninowy z opatrunkiem.

Działanie

- Hipoalergiczny - nie powoduje uczuleń
- Oddychający - przyspiesza gojenie się rany
- Komfortowy - nie przywiera do rany
- Elastyczny - dopasowuje się do kształtu ciała
- Praktyczny - do cięcia nożyczkami

Zastosowanie

Opatrywanie drobnych ran i skaleczeń. Niejałowe, jednorazowego użytku.

Sposób użycia

- Wyjmij plaster z opakowania bezpośredniego.
- Zaaplikuj plaster na czystą i suchą skórę, kierując opatrunkiem bezpośrednio na ranę.
- W celu usunięcia plastra, chwycić za jego krawędź i pociągnąć wzdłuż skóry, aż do całkowitego odklejenia.
- Zmieniaj plaster codziennie

Przeciwwskazania

Nie stosować na rany silnie sączące.



APTEKA "POD GWIAZDĄ I" SP. Z O.O.
Ul. Azalii Pontyjskiej 2A, Nowa Sarzyna
+48 500 623 943

Producent

PASO
Lutomierska 48
Pabianice