

Pasocare Med, paski do zamykania ran, jałowe, hipoalergiczne, 8 sztuk



Cena: 15,98 zł

Opis słownikowy

Dla kogo	Dla kobiet, Dla mężczyzn
Marka	PASO
Opakowanie	8 sztuki (5+3)
Postać	paski
Producent	PASO-TRADING SP. Z O.O.
Rodzaj produktu	Wyrób medyczny
Wiek	Dla dorosłych, Dla seniorów

Opis produktu

Opis

Hipoalergiczne paski do zamykania ran **Pasocare Med** to specjalne, samoprzylepne plastry, które zbliżają krawędzie ran, pomagając zapobiegać ich otwieraniu się podczas naturalnego procesu gojenia.

Zastosowanie

Hipoalergiczne paski jałowe do zamykania ran.

Sposób użycia

Oczyść i zdezynfekuj ranę, a następnie delikatnie ją osusz. Otwórz listek z plastrami w danym rozmiarze. Zegnij listek wzdłuż perforacji i pociągnij w celu odklejenia pasków. Zaaplikuj plaster, zbliżając do siebie krawędzie zranionej skóry, uważając przy tym, aby zbyt mocno jej nie naprężyć. Jeśli to konieczne, zastosuj więcej niż jeden pasek do zamykania ran w odległości nieprzekraczającej 1cm od siebie.

Ważne wskazówki

- Wyrób przeznaczony wyłącznie do użytku zewnętrznego.
- Przechowywać w chłodnym i suchym miejscu.
- Wyrób jednorazowego użycia.
- Przed zastosowaniem produktu oraz w przypadku zakażeń lub stanów zapalnych należy skonsultować się z lekarzem.
- Po otwarciu listka zużyj plastry niezwłocznie - wyrób jałowy pod warunkiem zachowania nieuszkodzonego opakowania.

Dodatkowe informacje

- 3x75mm - 5 sztuk,
- 6,4x80mm - 3 sztuki.



APTEKA "POD GWIAZDĄ I " SP. Z O.O.
Ul. Azalii Pontyjskiej 2A, Nowa Sarzyna
+48 500 623 943

Producent

Paso-Trading Sp. z o.o.
ul. Lutomska 48
95-200 Pabianice